


6. SimPadPLUSの使い方

課題

- ① SimPadPLUSを起動します
- ② マニュアルモードを選択します
- ③ あらかじめ設定されている「Circulation JA」というカテゴリにて「急性冠症候群（胸痛）」を選択します
- ④ スタートします
- ⑤ 手のアイコンをクリックして「気道の確認」をタップして記録します
- ⑥ 終了して、ログを確認します。




◆ 右のログの詳細が表示されれば終了です😊 ◆
おつかれさまでした

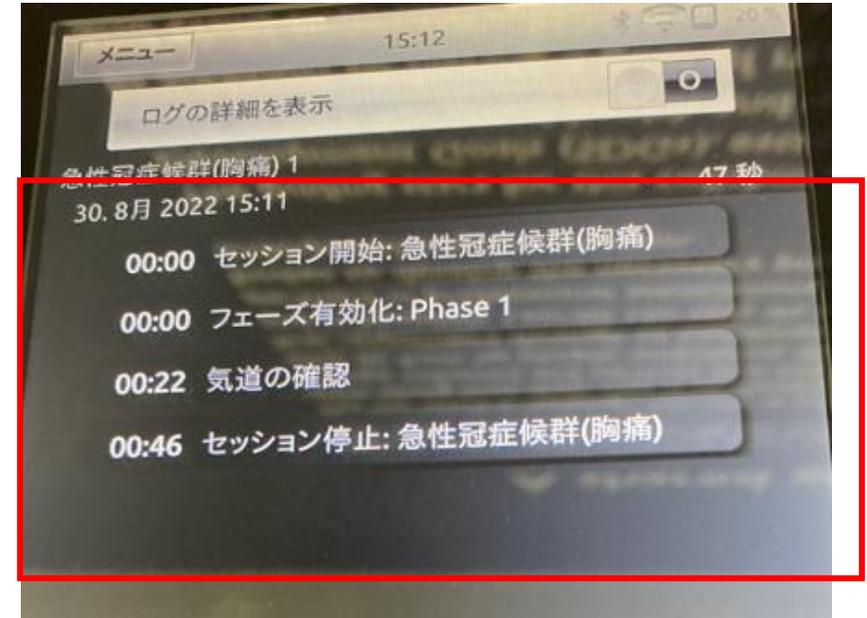

↑最終ログ。
この画面が確認できれば終了です。

6. SimPadPLUSの使い方

ヒント

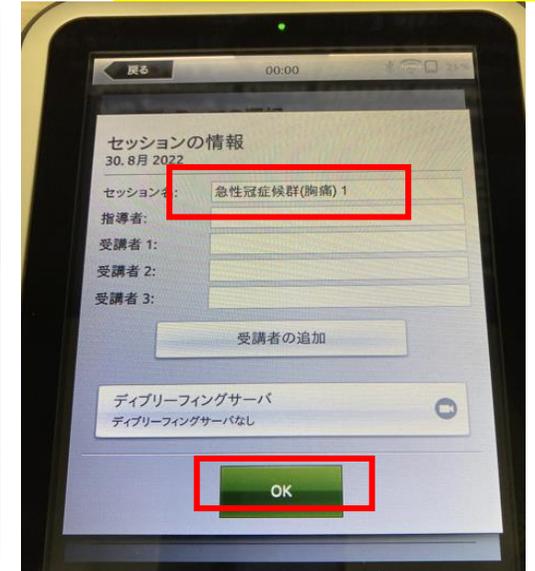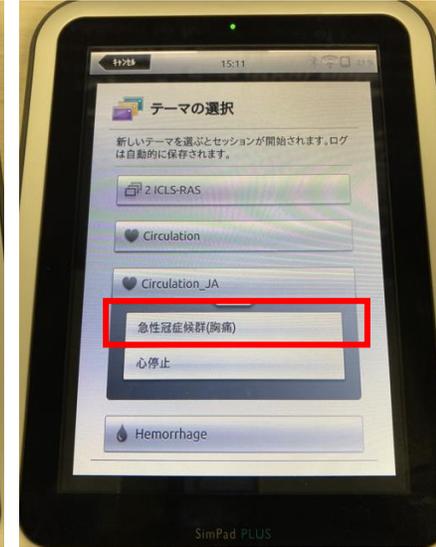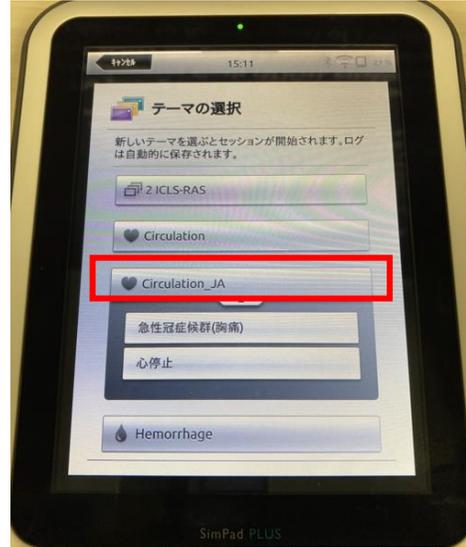

① マニュアルモードを選択 ② 「模擬患者」を選択


③ 「Circulation JA」 選択

④ 「急性冠症候群
(胸痛)」を選択、

⑤ OKをタップ


6. SimPadPLUSの使い方

ヒント

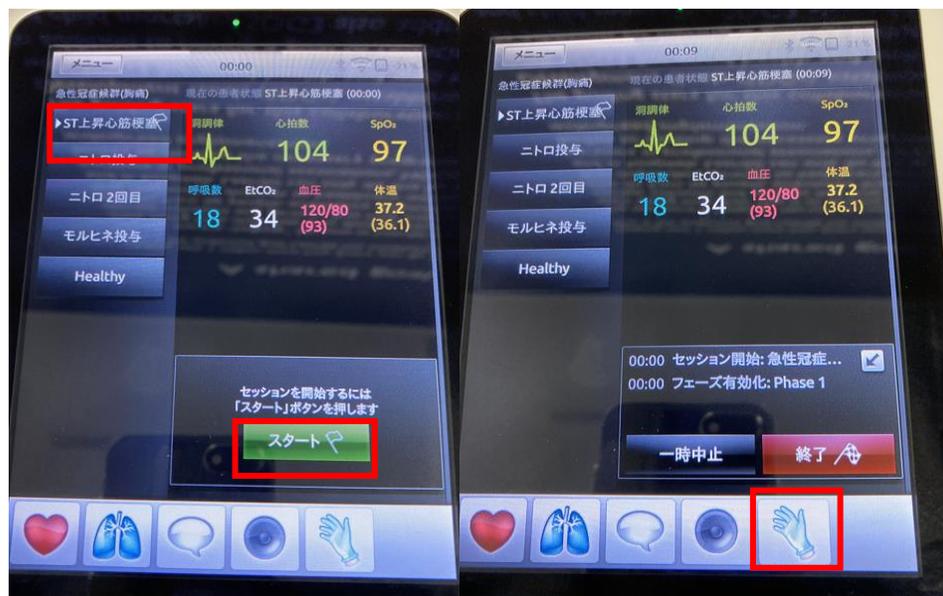


⑥ 「ST上昇心筋梗塞」のまま「スタート」をタップ


⑦ 手のアイコンをタップ

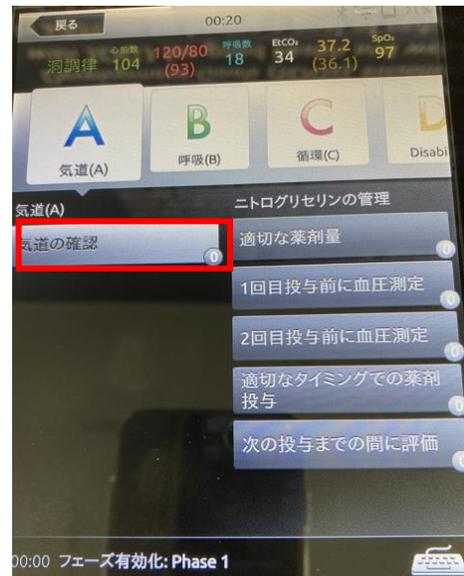

⑧ 「気道の確認」をタップ

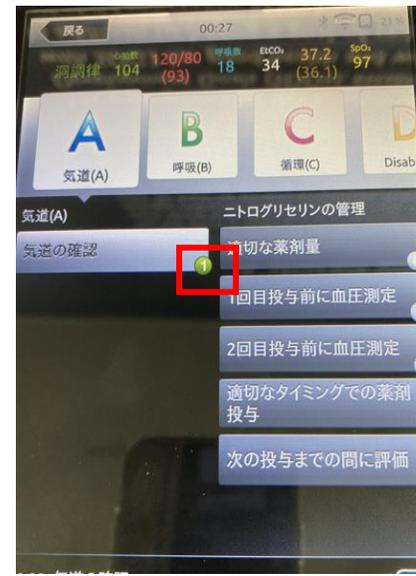



右下に数字の①が表示される

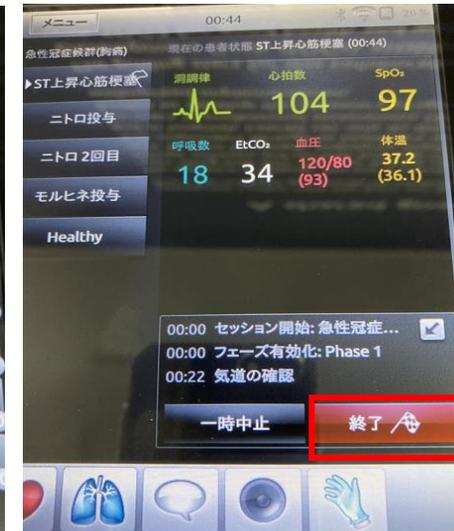

⑨ 「終了」をタップ

6. SimPadPLUSの使い方

ヒント

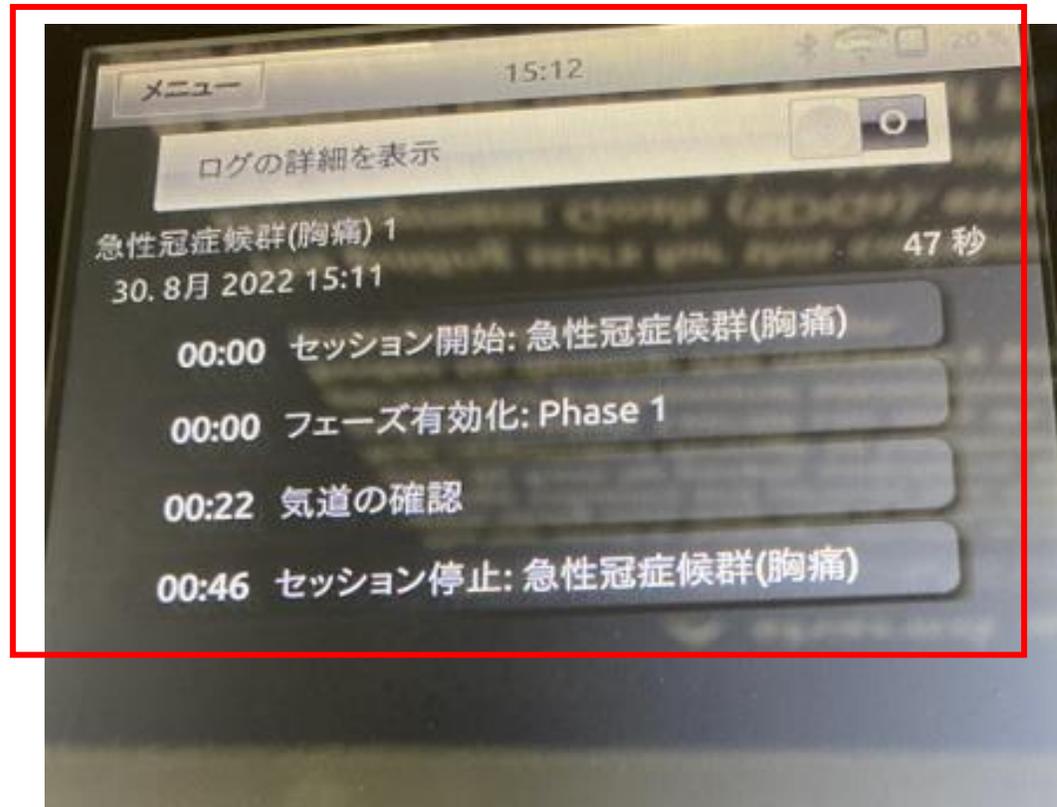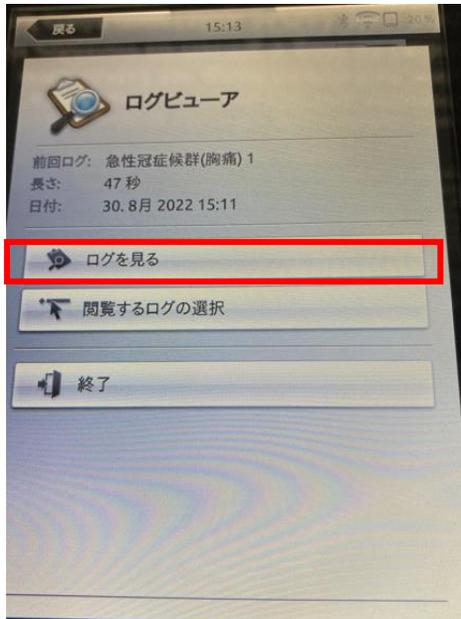

⑩ログを表示

↑ 最終ログ。この画面が確認できれば終了です。