

8-A ネットワークと接続状況

【接続状態】

シミュレータとSimPadPLUSの接続は、SimPadPLUSの画面右上のインジケータで確認します。

シミュレータが起動すると、シミュレータは咳をします。

【バッテリーの充電状況】

- シミュレータの電源：SimPadPLUSの画面右上にマネキンのアイコンで表示
- SimPadPLUSのバッテリーの状態：画面右上にパーセンテージで表示



注：SimPadPLUSとシミュレータ（リンクボックス）が接続されない場合、LANケーブルで1分以上接続した後、ケーブルを取り外すと、両者はペアリングされ接続されます。

