




## 8-G パーツ交換：IVアーム

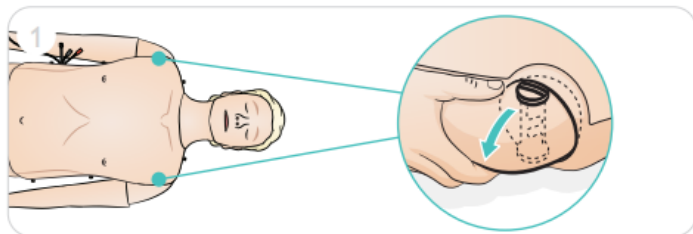


①IVアームの付け根のパーツを推して腕を胴体から外します。

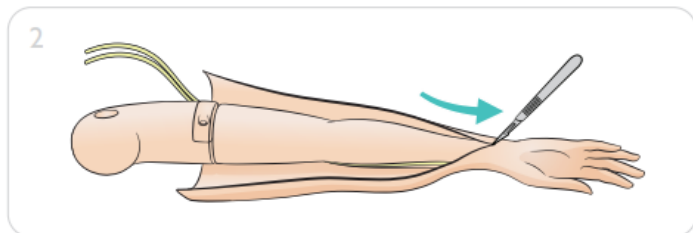

②カッター等を使ってIVアームのスキンを切り開きます。

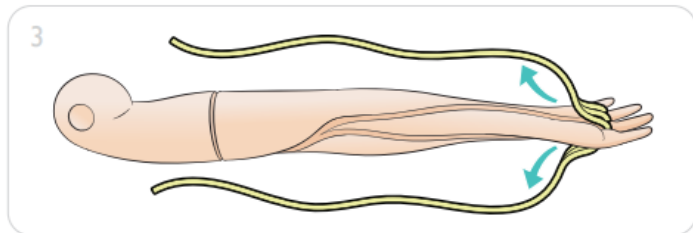


③アームに付着しているゴムチューブを取り除きます。

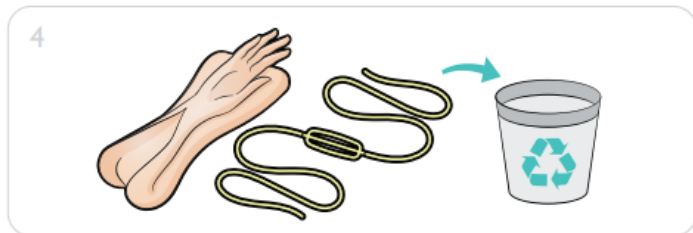

④古いIVアームスキンとゴムチューブを廃棄します。

※お住まいの地域の規則に応じて廃棄してください。


## 8-G パーツ交換：IVアーム

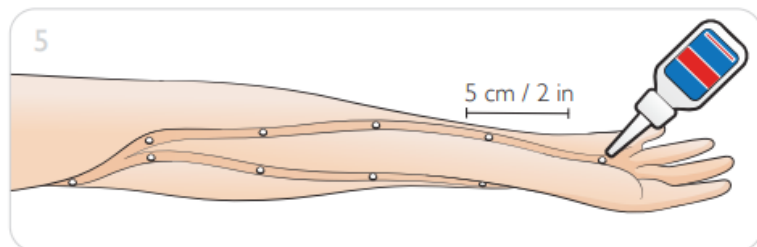


⑤速乾性のシアノアクリレート系接着剤（中程度の粘度）を5 cm 間隔でアーム本体に塗布します。例) アロンアルファ



⑥新しいIVアーム用ゴムチューブを準備します。

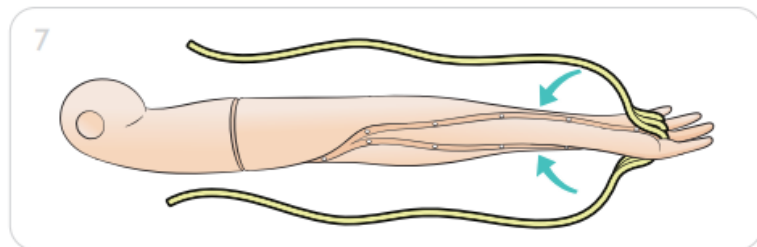


⑦指先部分から順にアーム本体の溝にそって配置します。

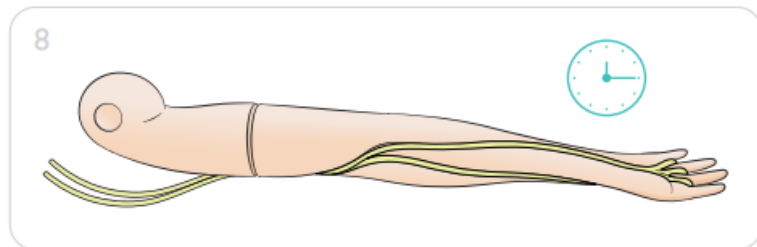


⑧15分ほど接着剤が乾燥するまで待ちます。


## 8-G パーツ交換：IVアーム

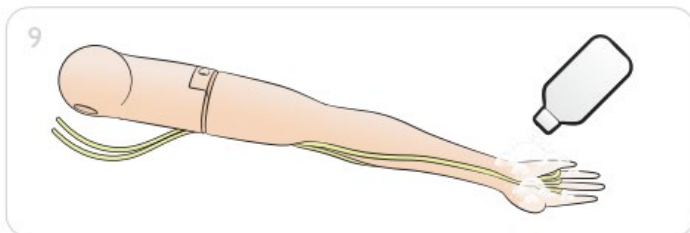


⑨スキンを装着する前に一般的なパウダーをIVアームの指先から腕にかけて塗布して滑りを良くします。

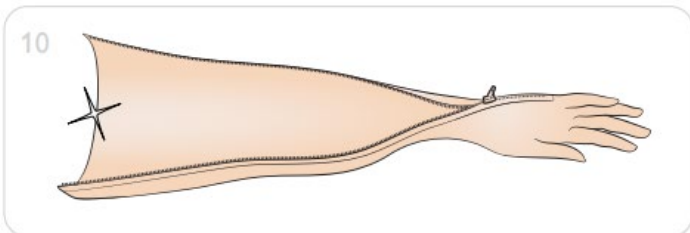

⑩新しいIVアーム用のスキンを準備します。

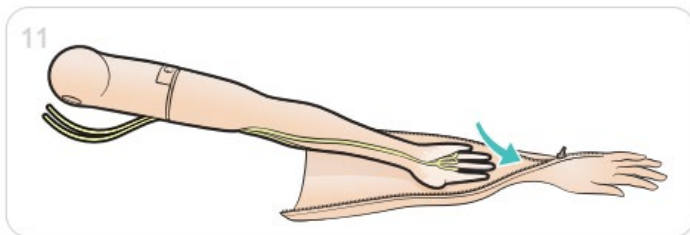


⑪スキンが指の1本1本にフィットするように装着します

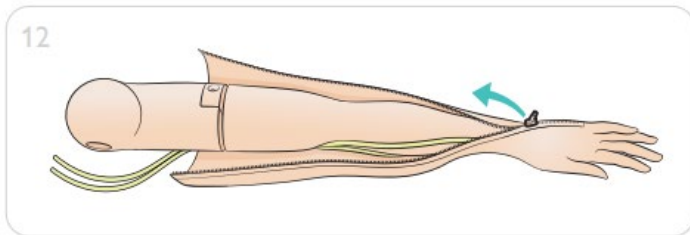

⑫最後にジッパーを閉じます。


◆◆ これでIVアームの交換は完了です ◆◆

## 8-G パーツ交換：瞳孔

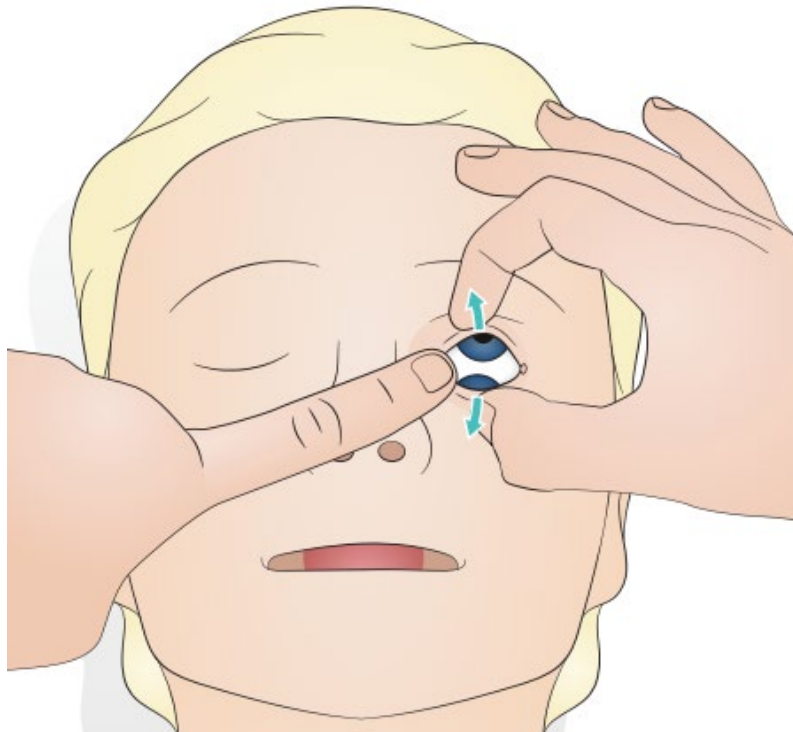


瞳孔はまぶたをゆびで押さえ、中のパーツを回転させて交換します。


## 8-G パーツ交換：バッテリー

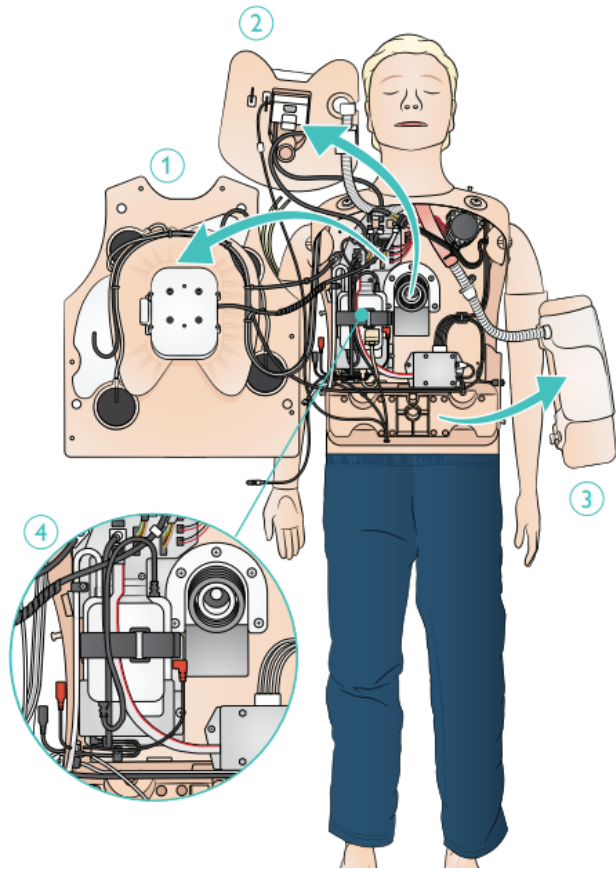

- ①胸部スキンを外します
- ②胸部プレートを外します
- ③下腹部パーツを外します
- ④バッテリーの黒いケーブルを外します

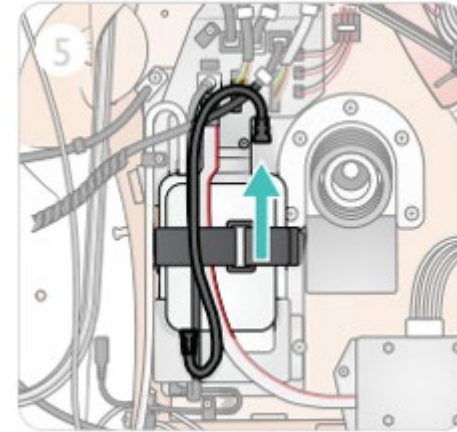

- ⑤バッテリーを固定している黒いバンドをゆるめバッテリー本体を外します

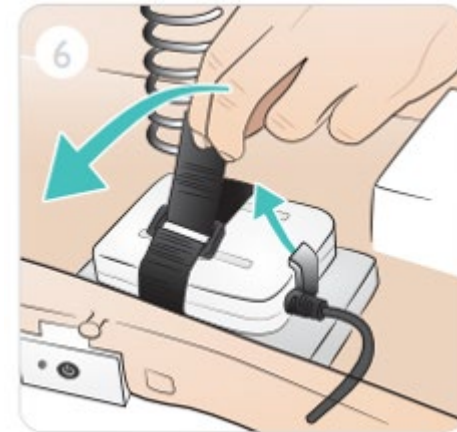


- ⑥新しいバッテリーを固定し差し込み、黒いバンドで固定し、④のケーブルを差しこみ、① - ③のパーツを戻します


◆◆ これでバッテリーの交換は完了です ◆◆

※使用済のバッテリーはお住まいの地域の規則に従って廃棄してください。


## 8-G パーツ交換：自発呼吸バルーン

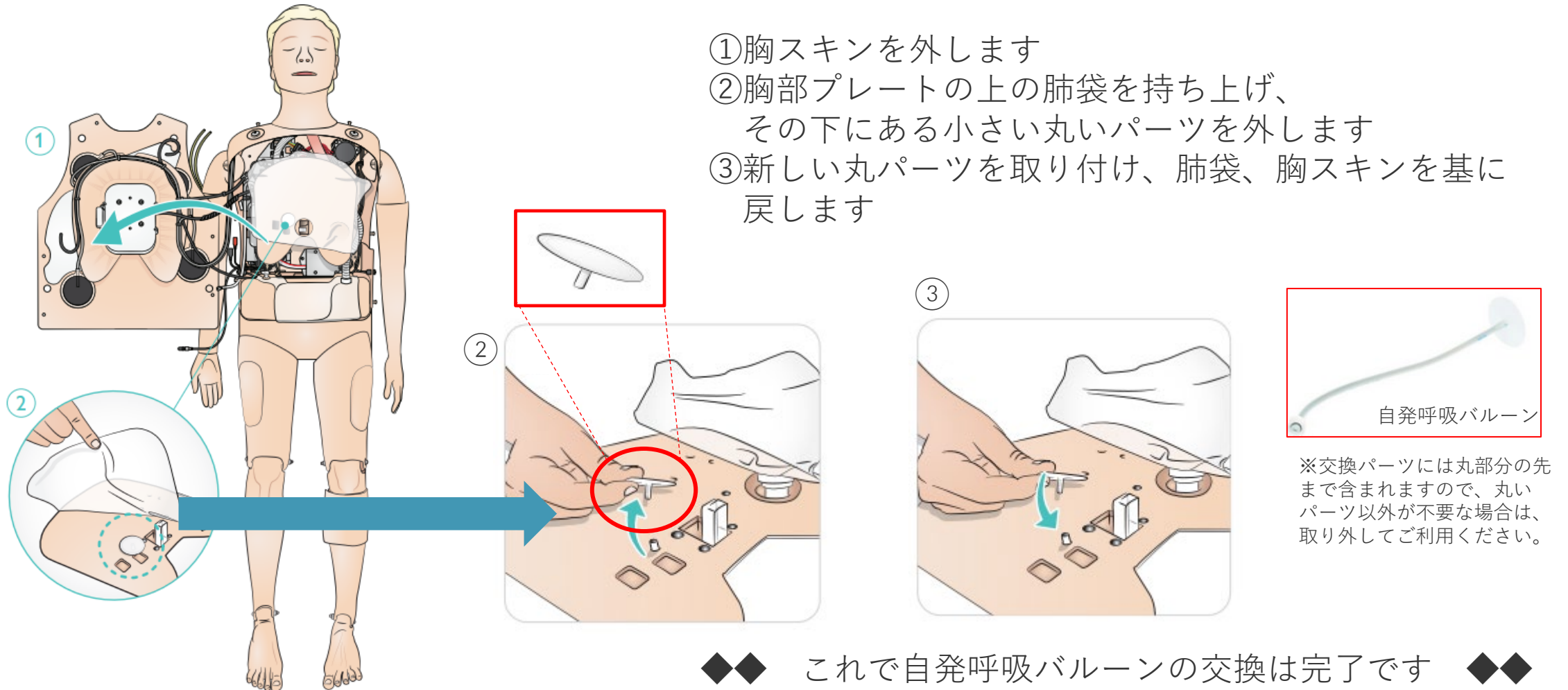

## 8-G パーツ交換：肺

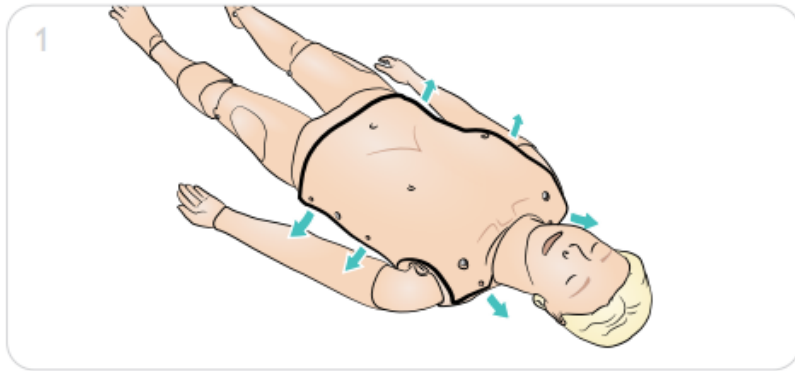



①胸スキンを外します

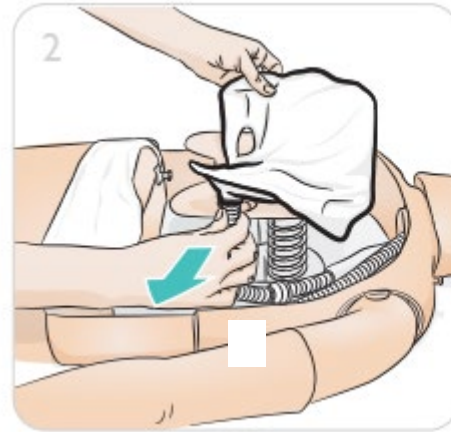

②胸部プレートの突起から肺を外します




③胸部プレート裏のコネクタから肺チューブを取り外して、廃棄します

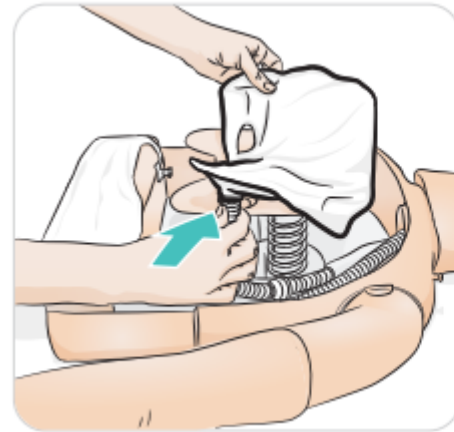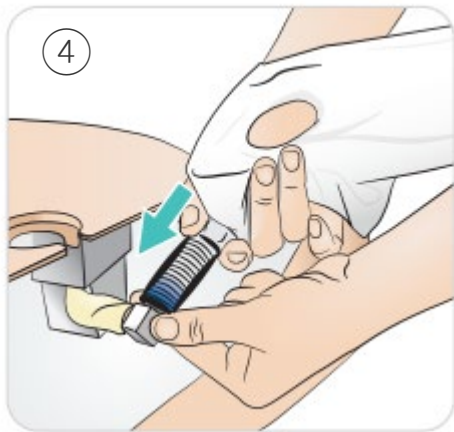


④新しい肺のチューブを胸部プレート裏のコネクタに差し込み、胸部プレートにしっかり固定し、胸スキンを戻します

◆◆ これで肺の交換は完了です ◆◆


## 8-G パーツ交換：胃

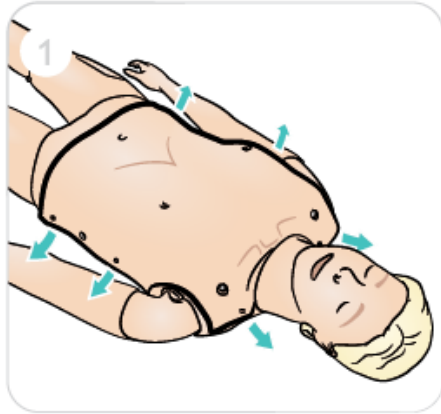




①胸スキンを外します

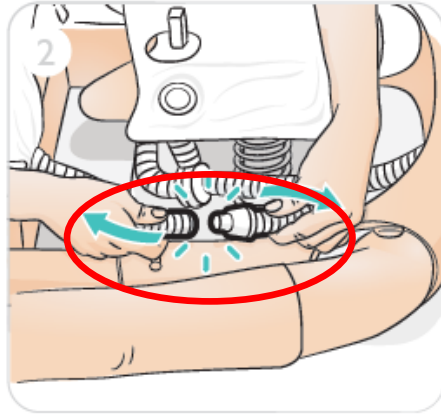

②胸部プレート下のチューブを外します

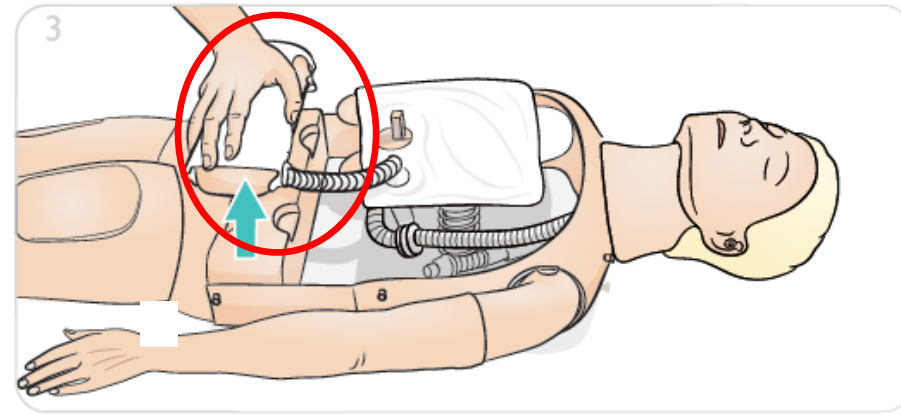

③腹部パーツを取り外します

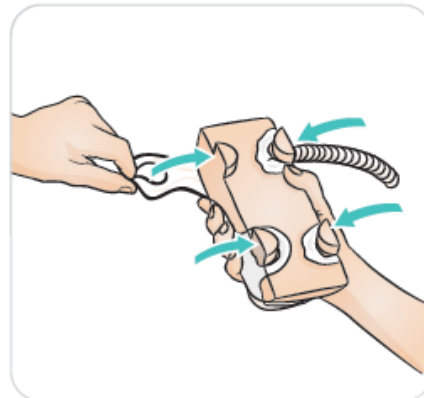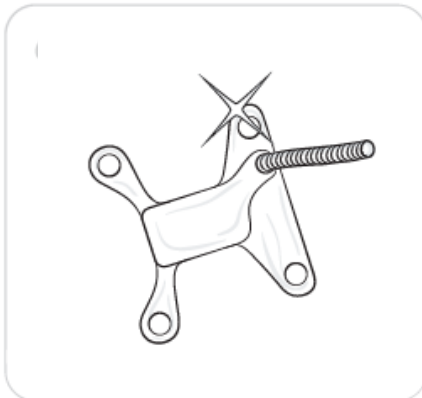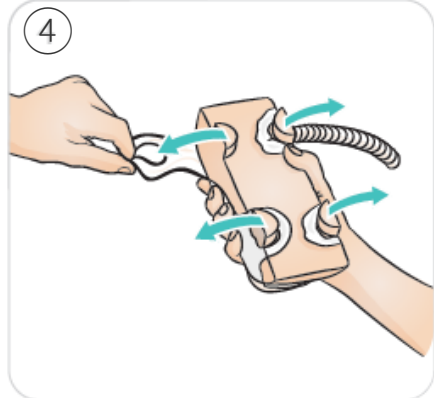


④胃を取り外し、廃棄します。その後、新しい胃を腹部パーツにセットし、腹部パーツを戻し、②のチューブを差しこみ、胸スキンを戻します


◆◆ これで肺の交換は完了です ◆◆




## 8-G パーツ交換：10

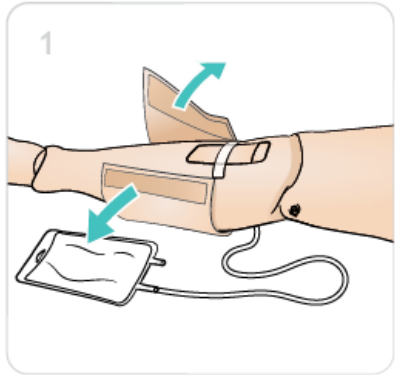


①足のスキン  
を外します

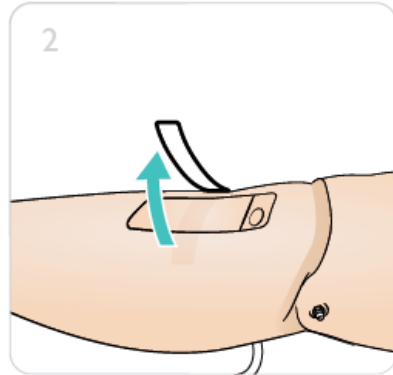


②パーツを固定  
しているシール  
をはがします

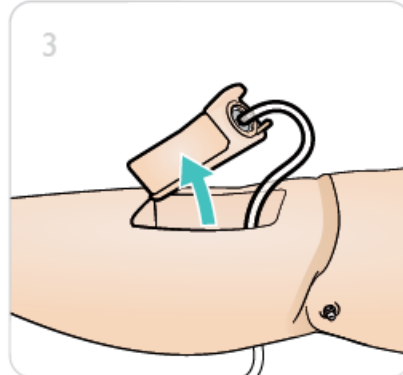

③10パーツを  
引き抜きます。

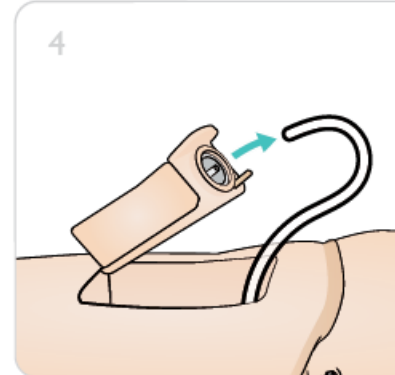

④チューブを  
外します。

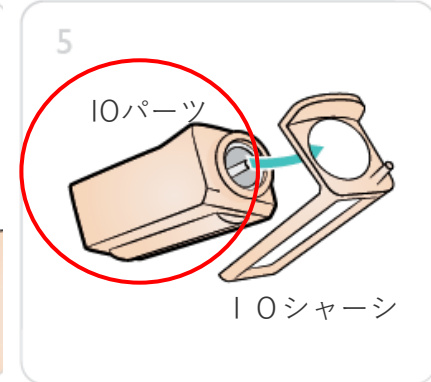


⑤脛骨10シャー  
シを外して残し、  
10パーツを処分  
します。

参考：10パーツの交換デモ動画（1分）


<https://youtu.be/0UHv8Hmb00M>




## 8-G パーツ交換：IO

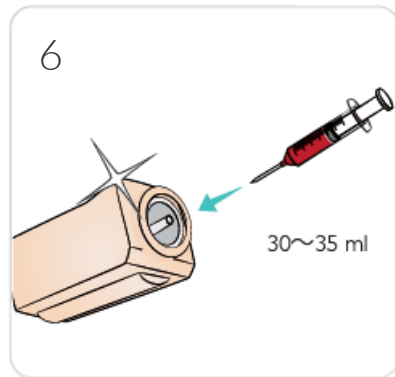


⑥新しIOパーツに疑似血液を補填します

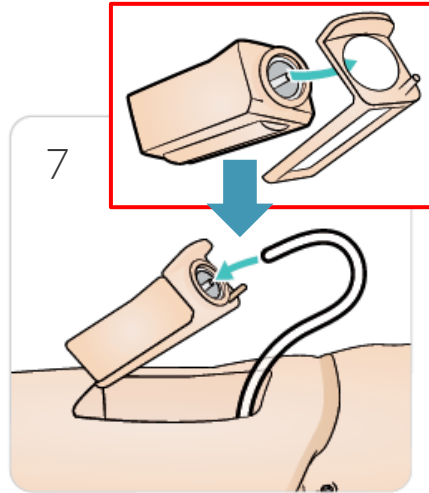


⑦IOパーツを脛骨IOシャーシにはめ、チューブを差します

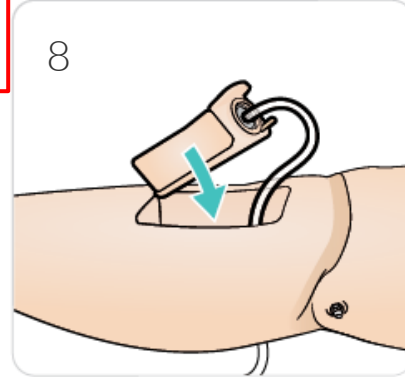

⑧IOパーツを足に戻し入れます

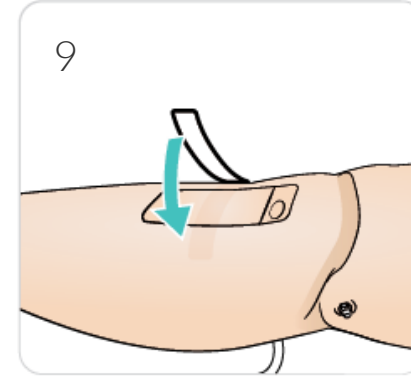

⑨固定シールを貼ります

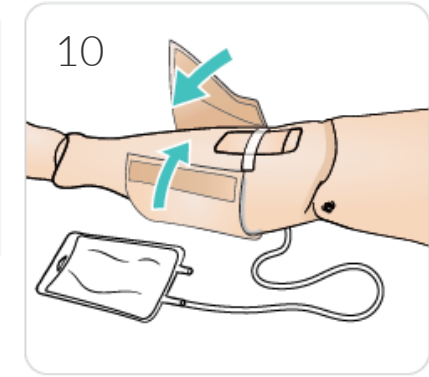

⑩④スキンを巻きます

◆◆ これでIOの交換は完了です ◆◆