


## 8. 血圧計のキャリブレーション

学習者の評価を行う際には、定期的に血圧計の校正を行ってください。

マニュアルモードで、

- ① 任意のテーマを選択し
- ② OKをタップし
- ③ スタートでセッションを開始します

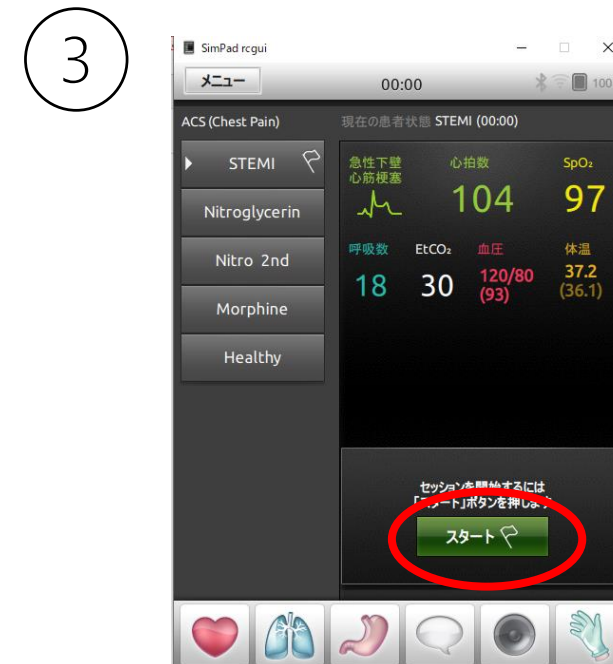

## 8. 血圧計のキャリブレーション

- ④ 左上のメニューをタップし
- ⑤ 「マニュアルモードの設定」をタップし
- ⑥ 「血圧計のキャリブレーション」をタップし
- ⑦ 画面の指示に従ってキャリブレーションを実施します

