

4. SimPadPLUSの使い方

目次



- ❖ 各部の名称
- ❖ 電源を入れる
- ❖ 電源を切る
- ❖ ホーム画面
- ❖ マイクの使い方
- ❖ マニュアルモード
- ❖ オートモード
- ❖ QCPRフィードバック




Laerdal

helping save lives

SimPadPLUSの使い方 - 各部の名称

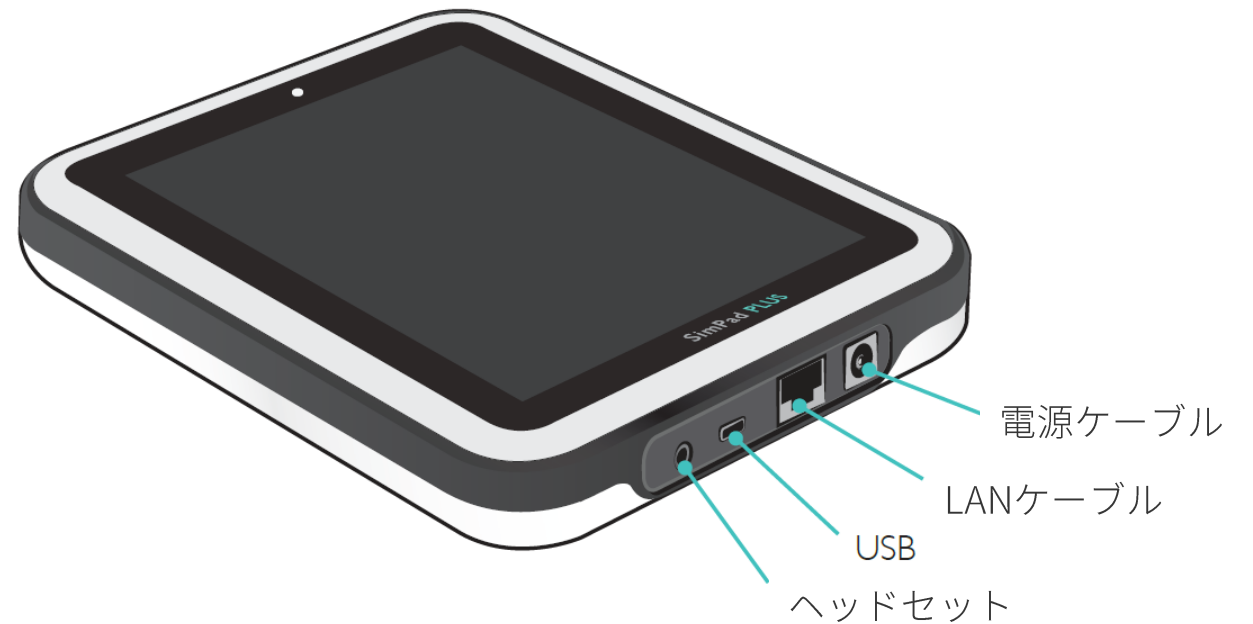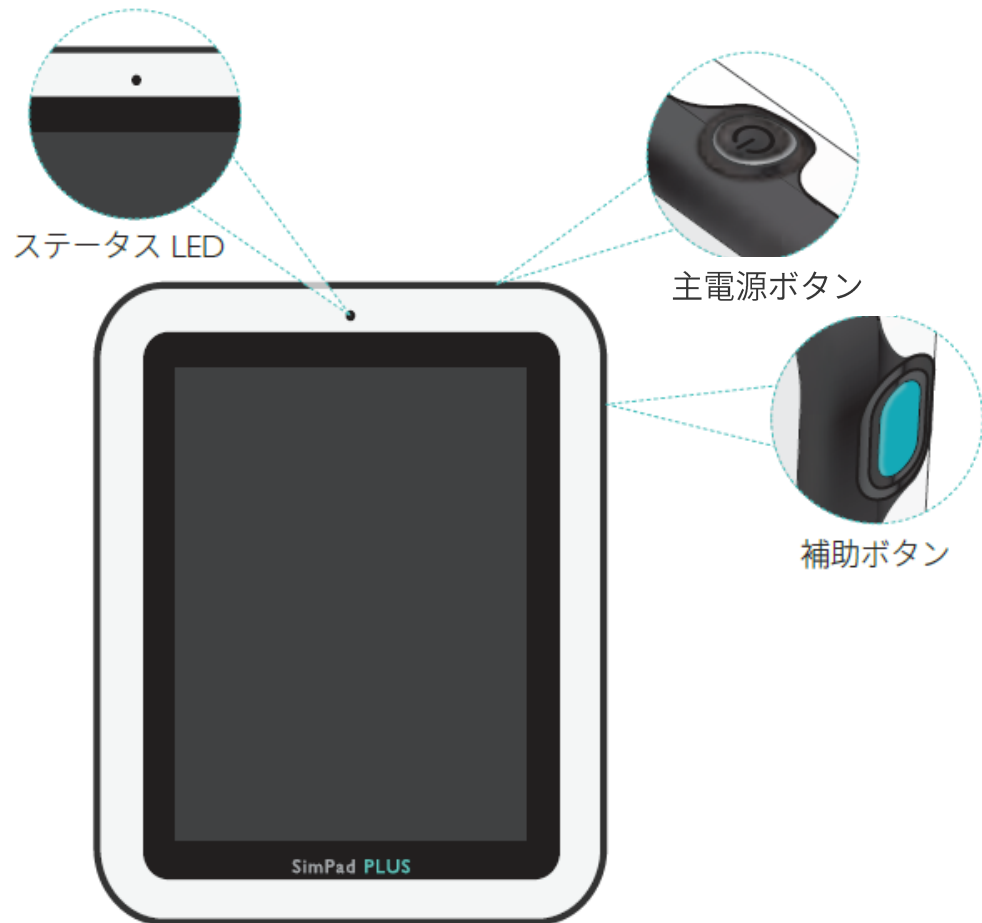

SimPadPLUSの使い方 – 電源を入れる

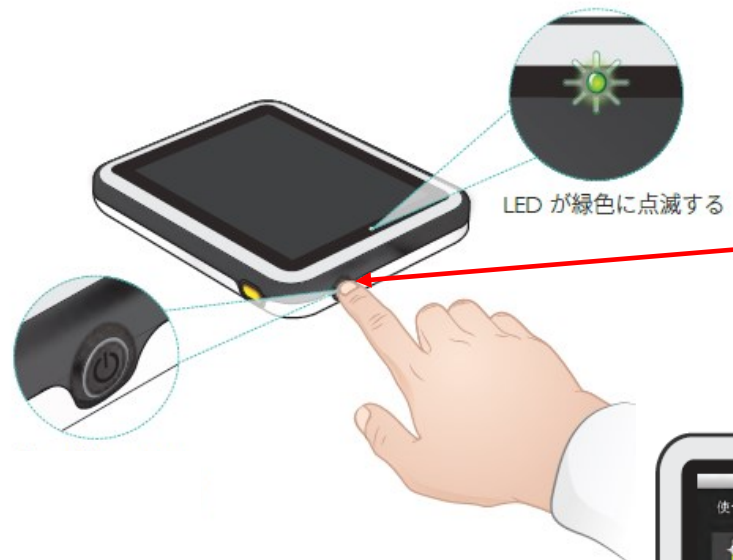

上部の主電源ボタンを押すとSimPadPLUS上部のライトが緑色に点滅します。点灯に変わったら準備完了です。



注意：側面の青（黄色）のボタンは主電源ボタンではありません。

SimPadPLUSの使い方 – 電源を切る



主電源ボタンを押した際の
SimPadPLUSの画面




②タップして
SimPad PLUSと
シミュレータを
シャットダウンする

SimPadPLUSの使い方 - ホーム画面

ホーム画面にてまず「**マニュアルモード**」を選択すると「テーマの選択」画面が表示されます。

これらは「**カテゴリ**」と呼ばれ、その下に「**テーマ**」があります

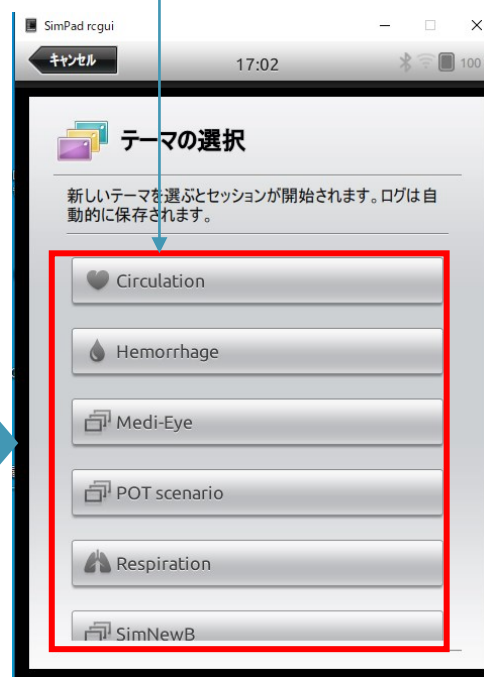

テーマとは、
あらかじめ設定された
患者の状態です

SimPadPLUSの使い方 - ホーム画面

「テーマ」をタップすると、画面に変わり「患者状態」が選択肢として表示されます



SimPadPLUSの使い方 - ホーム画面

B. ホーム画面の説明

例)

STEMIをタップすると「患者状態」のパラメータが画面右に表示されます。


選択した状態にはアイコンが表示されています。

インストラクターは、学習者が実施した処置に応じて、シミュレータの「患者状態」をタップして実行し、バイタルサインを変化させます。


例) Nitroglycerin (ニトログリセリン) をタップし、実行をタップすると状態が変化します。



SimPadPLUSの使い方 - マイクの使い方

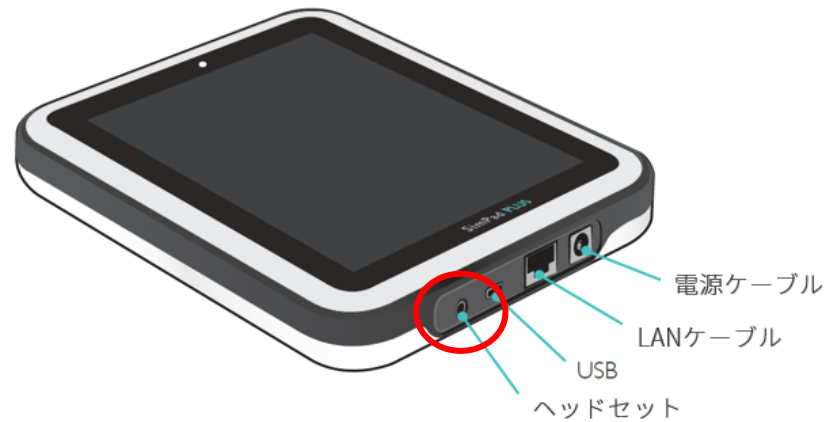

- ① ヘッドセットをSimPadPLUSに接続します。
- ② インストラクターはSimPadPLUSの青の補助ボタンを長押しして話します。
インストラクターの声が「患者の声」としてシミュレータの頭部スピーカーから流れます。

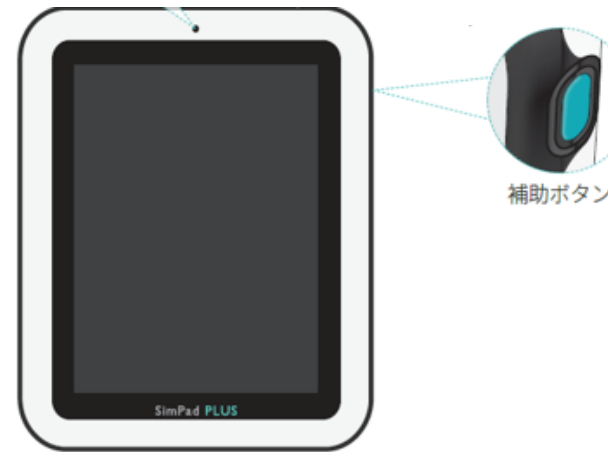

※オプションとしてマイクを別途購入し、シミュレータ内のリンクボックスに接続すると、シミュレータの周囲の音を拾って、インストラクター用ヘッドセットで聴くことができます。詳細については レールダルヘルプデスク 0120-309-060 までお問い合わせください。

SimPadPLUSの使い方 - マニュアルモード

操作方法として、マニュアルモードかオートモードが選択できます。

マニュアルモードとは文字通り、マニュアル=手動でバイタルサインなどを操作することです。

まず、マニュアルモードの操作方法を見てみましょう。



【説明書】

https://cdn.laerdal.com/downloads/f6685/5-E_SimPadPLUS_.pdf

※シミュレータに接続せずに、SimPadPLUSの画面で「模擬患者」を選択して、操作を確認できます

実際にSimPadPLUSを手に取り、画面を操作しながら説明書をご覧ください。ことをおすすめします



SimPadPLUSの使い方 – オートモード

オートモードでは、標準化されたシナリオを使って、高い一貫性を保てます。

SimPadPLUSには、あらかじめインストールされたサンプルシナリオがあります。

オートモードには、学習者概要、学習目標、機器のチェックリストなどのサポート資料が付いてきます。

シナリオを開始した後、インストラクターは実施された介入をタップして記録するだけで、後は文字通りオート＝自動でシナリオが展開していきます。

実施した内容やコメントはすべて記録されるため、セッション後のディブリーフィングに活用できます。



Adobe Acrobat
Document

【説明書】

[https://cdn.laerdal.com/downloads/f6686/5-F_SimPadPLUS .pdf](https://cdn.laerdal.com/downloads/f6686/5-F_SimPadPLUS.pdf)

※シミュレータに接続せずに、SimPadPLUSの画面で「模擬患者」を選択して、操作を確認できます

実際にSimPadPLUSを手に取り、画面を操作しながら説明書をご覧ください。おすすめします。

SimPadPLUSの使い方 – QCPRログ

SimPadPLUSを使ってCPR対応のシミュレータやマネキンを操作し、CPRを実施するとSimPadPLUSの画面にリアルタイムでCPRフィードバックが表示されます。

【フィードバック画面の見方】

https://cdn.laerdal.com/downloads/f6687/5-G_SimPadPLUS_QCPR.pdf

