

# 1. 各種構成のご紹介

## 目次

- ❖ 全体の構成
- ❖ レサシアンシミュレータPLUSの構成
- ❖ SimPadPLUSの構成
- ❖ 使用上の注意



**Laerdal**

helping save lives

# 全体の構成：使用時に必要なもの

レサシアンシミュレータ  
使用時の構成：

- ① シミュレータ
- ② SimPadPLUS (操作用)
- ③ 患者モニタ
- ④ ルーター

レサシアンシミュレータPLUS



患者モニタ  
(タブレットまたはラップトップ)



ルーター



SimPadPLUS



# レサシアンシミュレータPLUSの構成品

① 上半身

⑤ 疑似血液

⑥ 潤滑剤

⑦ 除細動手動アダプタ

⑧ 空気ポンプ

⑨ 血圧カフ

⑩ リザーババッグ



② 下肢

③ パンツ

④ ソフトケース

⑪ ヘッドホン

⑫ ACアダプタ

⑬ LANケーブル

⑭ マイク延長ケーブル



⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

# SimPadPLUSの構成品（8点）



① SimPadPLUS本体



② リンクボックス



③ リチウムイオン  
バッテリー



④ ケース



⑤ ストラップ



⑥ USBケーブル



⑦ 電源ケーブル



⑧ LANケーブル

※リンクボックスとリチウムイオンバッテリーはシミュレータに内蔵されています。

# 使用上の注意

## ❖ ラテックスについて

レールダルは、ラテックス素材の代替品を積極的に採用しています。

SimPadPLUSシステムは、天然ゴムラテックスを使用していません。

シミュレータの外装部品には、特にIVアームチューブなど一部天然ゴムラテックスを含むものがあります。トレーニング製品およびトレーニング環境において、ラテックスやラテックスの残留物が含まれている可能性が高いと想定してください。

ラテックス過敏症であることが判明している場合、またはその疑いがある場合は、安全な作業手順を確立し、ラテックスへの曝露の可能性について個人が責任を負うことが特に重要です。

## ❖ 濡れた状態での使用について

SimPadPLUSやシミュレータは、水中や水辺で使用しないでください。濡れた手でSimPadPLUSを操作しないようにしてください。

## ❖ 除細動について

シミュレータで除細動を行う際は、地域のプロトコルに従って適切に操作してください。