

医療用品(05) 副木  
一般医療機器 単回使用パッド入り副木 35357000

## スティフネック セレクト

### 再使用禁止


#### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 患者に装着したままサイズを調節しないこと。

#### 【形状・構造及び原理等】

##### <各部の名称>

写真は成人用

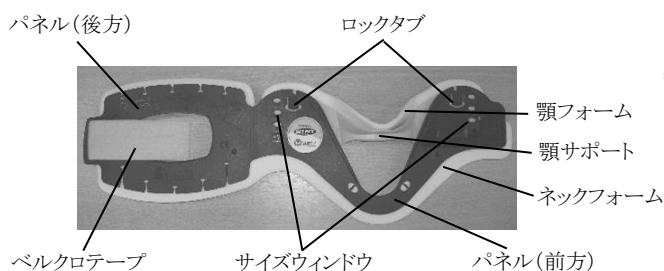

##### <寸法>

パネル

成人用: 564mm × 175mm (許容差±5%)

小児用: 480mm × 140mm (許容差±5%)

##### <体に接触する部分の原材料>

ネックフォーム: ポリエチレン

顎フォーム: ポリエチレン

#### 【使用目的又は効果】

救急現場において頸椎損傷が疑われる患者の頸部を素早く固定し、搬送時の損傷拡大を防止します。

#### 【使用方法等】

詳細については、取扱説明書をご参照下さい。

1. 一人が患者の頭部を正中中間位(ニュートラルポジション)で保持し、もう一人が肩から顎までの長さを指の本数で計測します。なお、患者の頭部は装着している間も常に両手で保持し続けて下さい。
2. 計測した長さに基づき、適切なサイズウインドウを選択します。選択した位置に顎サポートを調節し、左右のロックタブを押して固定します。
3. 装着しやすいように、予めパネルを変形させます。
4. 顎サポートを患者の下顎に当てます。
  - (1) 座位・立位の場合  
患者の前胸壁を滑らすようにして、顎サポートを下顎に乗せます。サイズが合わない場合は、取り外してサイズを合わせてから当て直して下さい。
  - (2) 仰臥位の場合  
パネル(後方)を首の後ろに滑り込ませてから、顎サポートを下顎に当てて下さい。
5. パネル(後方)を後頭部に巻き付けて、ベルクロテープをしっかりと留めます。

#### 【使用上の注意】

##### <重要な基本的注意>

1. 脊椎の損傷が疑われる場合は、頸部固定だけでなく脊椎全体の固定を行うこと。
2. サイズの合わないものは使用しないこと。大きすぎると患者の頸椎が過度に伸展されることがあり、小さすぎるとしっかり固定できません。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### \*\*<使用条件>

使用温度: -18℃ ~ +43℃

##### <保管方法>

保管温度: -34℃ ~ +52℃

折りたたんで保管しないこと。平らにして保管して下さい。

##### <使用期間>

24時間を超えて使用しないこと。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: レールダル メディカル ジャパン株式会社

\* 住 所: 東京都千代田区三番町6番地26  
住友不動産三番町ビル

電話 番号: 03-3222-8080

お問い合わせ先: レールダル・ヘルプデスク

電話 番号: 0120-309-060 平日 9:00~17:30

取扱説明書を必ずご参照下さい。