


JP

リトルアン 2.0 QCPR

ユーザーガイド

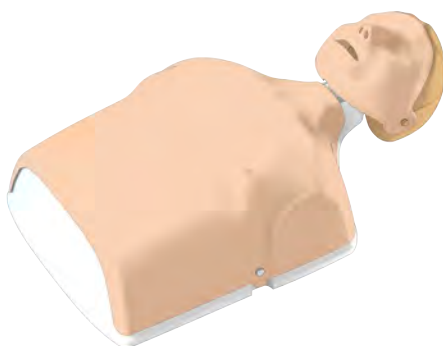

Laerdal
helping save lives

目次

はじめに	3
特徴	3
追加情報	3
同梱品	4
セットアップ	5
開梱	5
電池の取付け方	6
マネキンの準備	7
QCPRアプリへの接続	12
QCPRアプリへのログイン	12
アプリケーションへの接続	12
スキルガイドへの接続	16
収納	18
メンテナンスとクリーニング	23
エアウェイの交換	23
フェイスのクリーニング	23
胸スキンのクリーニング	23

はじめに

リトルアン 2.0 QCPR は、CPR（心肺蘇生法）、胸骨圧迫、人工呼吸のトレーニング用に開発されたマネキンです。携帯電話や、タブレットにインストールしたQCPR アプリを介してリアルタイムフィードバックとディブリーフィングが可能です。



特徴


- 頭部後屈
- 下顎挙上
- 鼻をつまめる

追加情報

- 本製品はスキルガイドと併用できます。
- QCPR アプリに対応。
- How-to ビデオは[こちら](#)をご確認ください。

同梱品


- マネキン 6体
- マネキンフェイス 6枚
- マネキンフィルタ 60個
- 顔（頭部顎付） 6個
- 後頭部 6個
- ユーザーガイド
- 重要事項説明書
- 単三電池

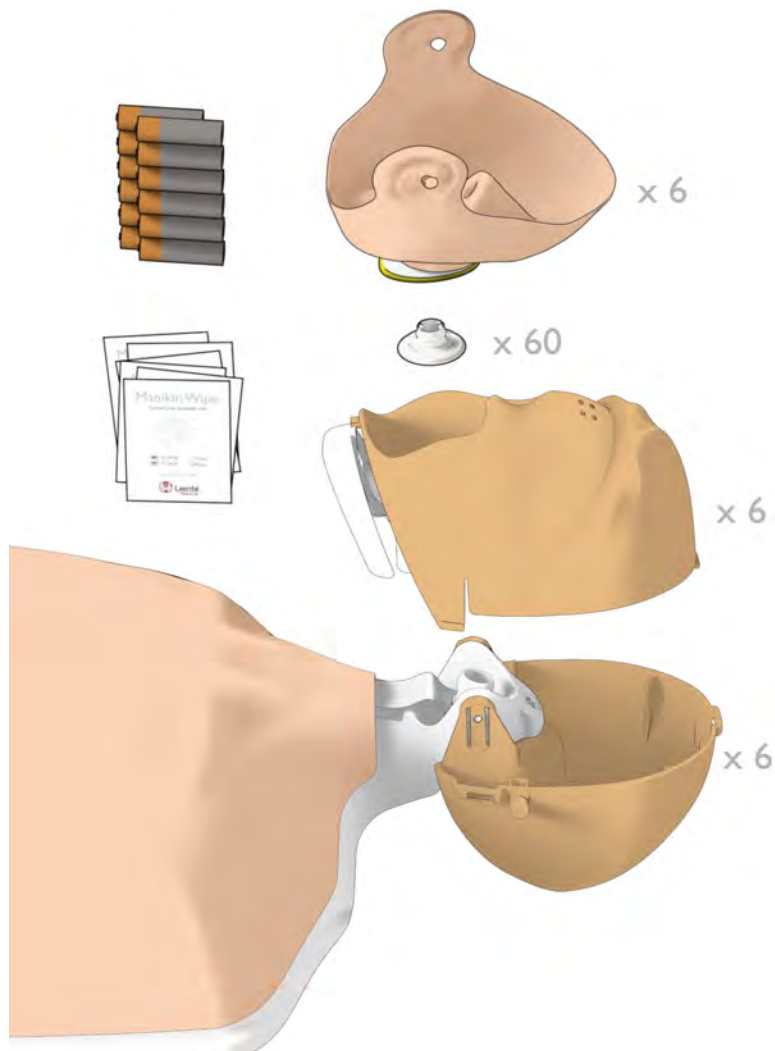

セットアップ


開梱

1. スーツケースを開け、マネキンを取り出します
2. マネキンを平らな場所に置きます

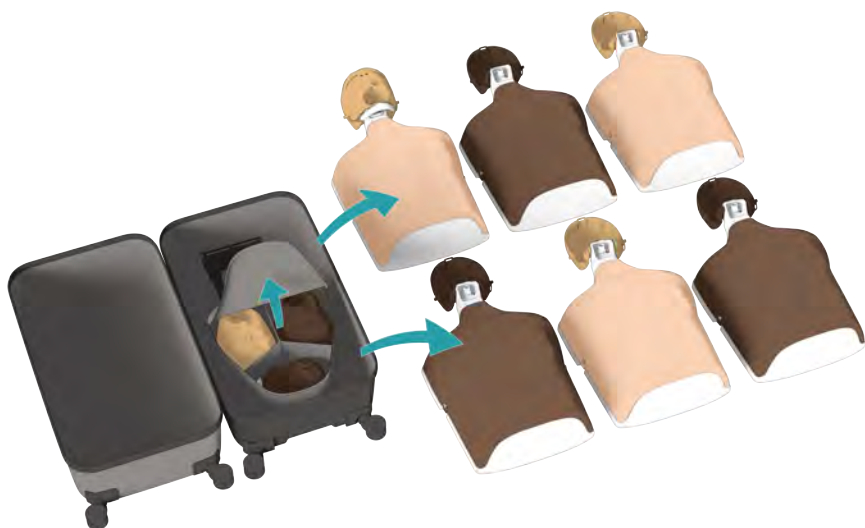


電池の取付け

1. マネキンをうつぶせに置きます
2. 電池入れの蓋を開けます

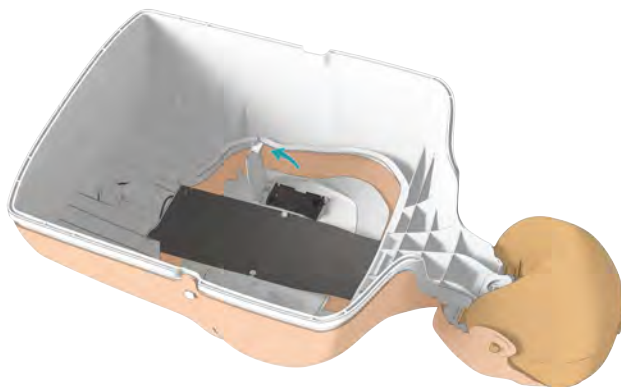

3. リボンの上に電池を入れます

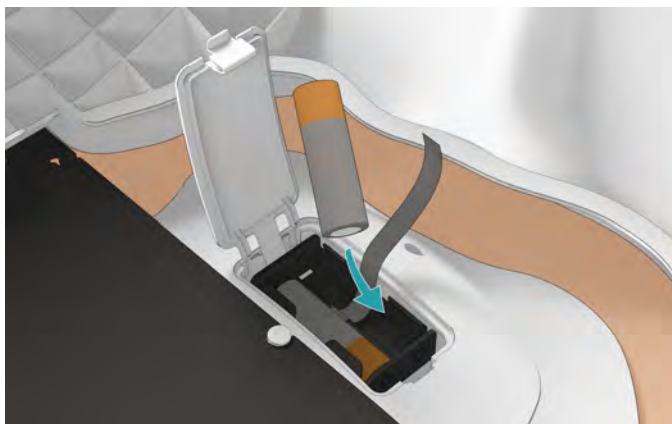

注意

電池を取り出しやすくするため、電池を入れる前にバッテリーリボンが正しい位置にあることを確認してください。

4. 電池入れの蓋を閉じます



注意



- 本製品には単三電池をご使用ください
- 使用後の電池は各地域の指示に従って廃棄/リサイクルしてください

マネキンの準備


1. スーツケースの底にあるポーチからマネキンの顔(前頭部)を取り出します




2. 顔と後頭部を留めます

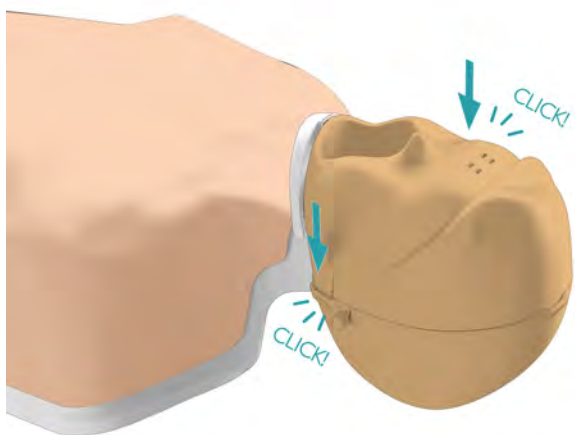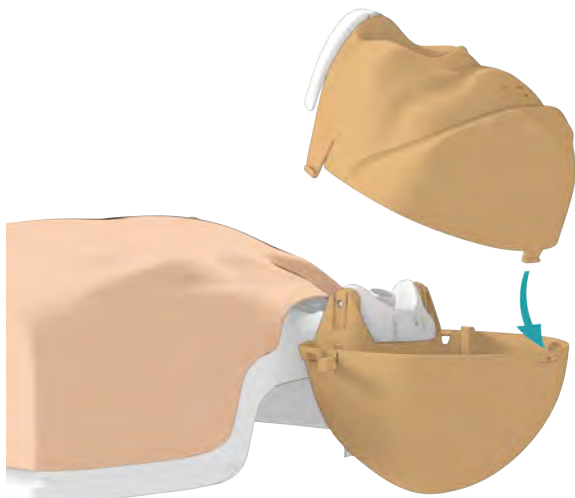


- フェイススキンを裏返します

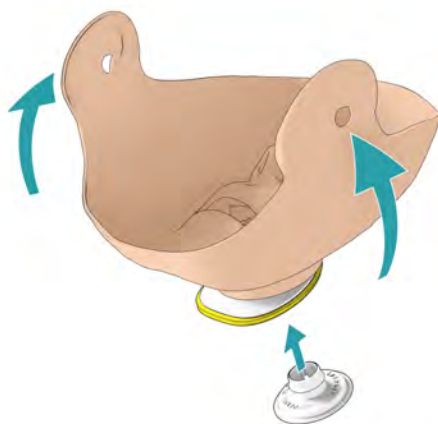


- 内側のフィルタホルダーに、マネキンフィルタを取り付けます

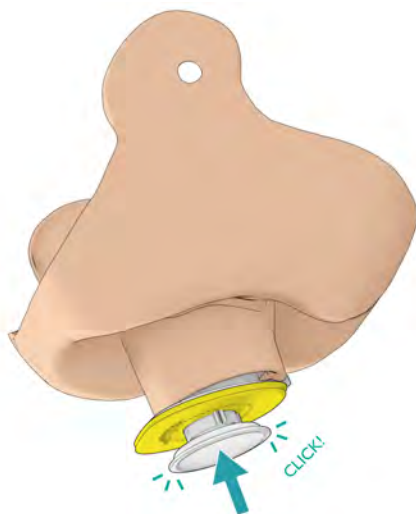

5. マネキンフィルタを顔の口にあわせ、フェイススキンを広げます

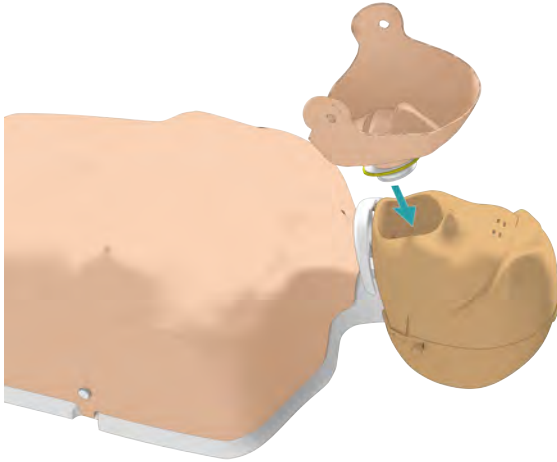

6. フェイススキンであごを覆い、両耳に取付けて固定します

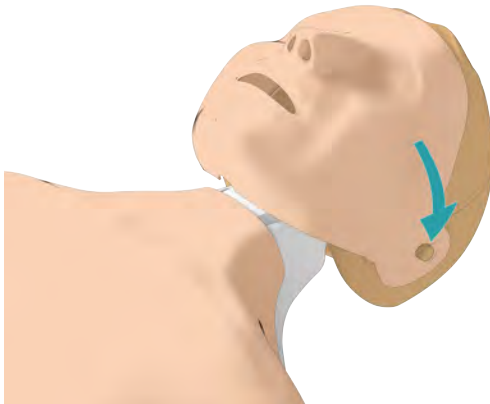

7. 胸骨圧迫を1回行い電源を入れます。マネキンからビープ音が鳴ります。

**注意**

以下の条件でマネキンは自動的に電源が切れます


- マネキンが10分間 QCPR アプリに接続されていない場合
- マネキンが60分間 QCPR アプリに接続していても使用していない場合。電源を入れ直すには胸骨圧迫を1回行います。

QCPR アプリへの接続

QCPR アプリへのログイン

インストラクターとして使用する場合はQCPR アプリへのログインが必要となります。QCPR アプリは無料でご利用いただけます。ただし、アプリのダウンロードにかかわる通信料や、アプリご利用に伴う通信料はお客さま負担となります。[Apple Store](#)と[Google Play](#)よりダウンロードすることが可能です。

1. QCPR アプリのインストラクターよりログインします
トレーニングモードが開きます

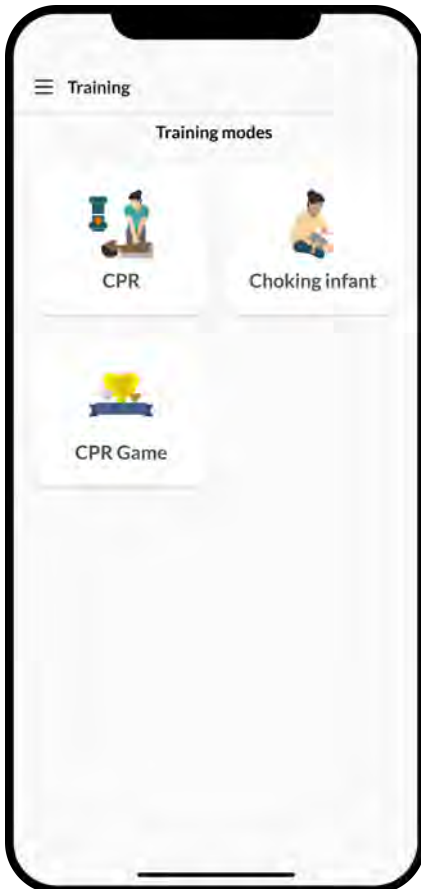

2. CPRを選択します




3. Bluetooth がオンになっていることを確認してください

4. マネキンの電源を入れます。




注意

マネキンの電源を入れるには胸骨圧迫をします。6台までのマネキンを接続できます。

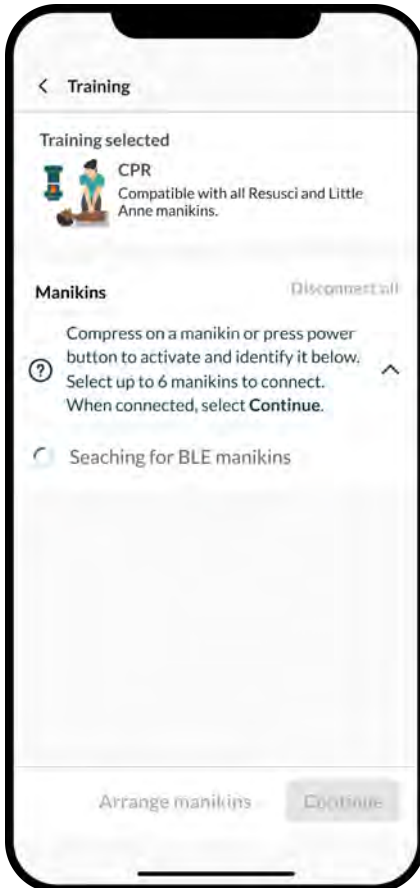

5. 表示された一覧からマネキンを選択します。

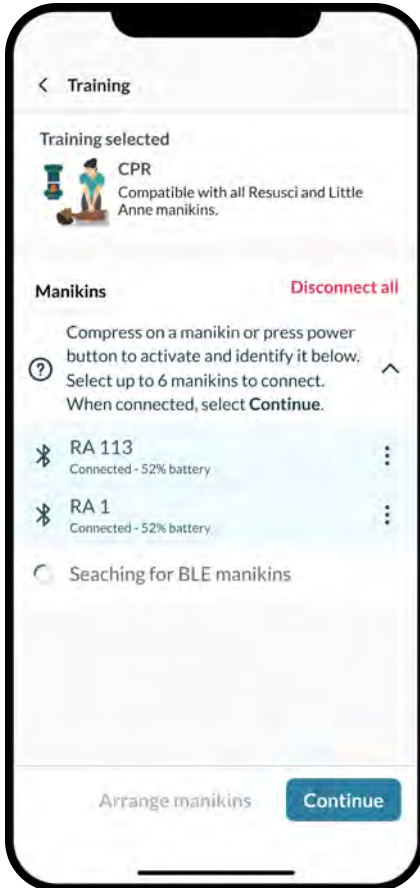

6. 続行をタップします
選択したマネキンが接続されます

スキルガイドへの接続


1. マネキンをうつ伏せにすると右側にケーブルコネクタがあります
2. スキルガイドケーブルを首に通します




注意

ケーブルを傷つけないよう、図の通りに配置してください

3. スキルガイドケーブルをマネキンに接続します

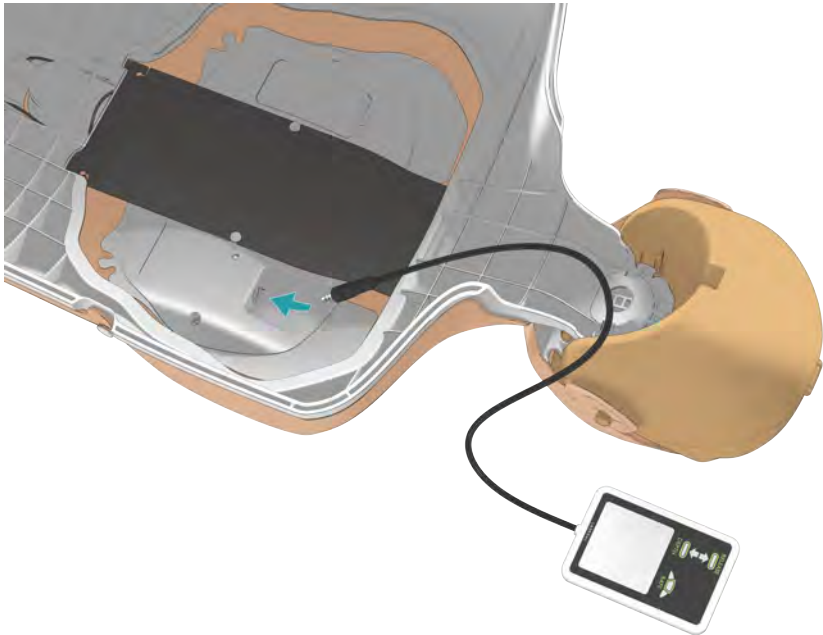

4. マネキンを仰向けにします

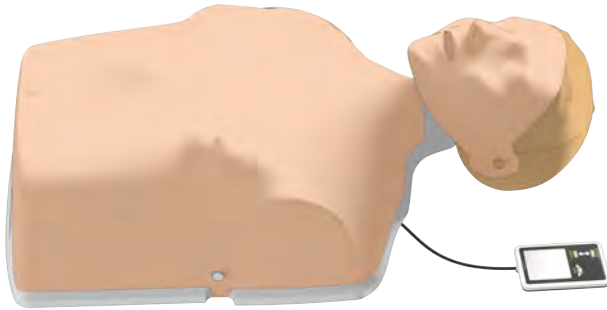

5. マネキンの電源を入れます




注意


スキルガイドの詳細については、[スキルガイドのユーザーガイド](#)をご覧ください。

収納

1. 顔の両側（耳）からフェイススキンを取り外します

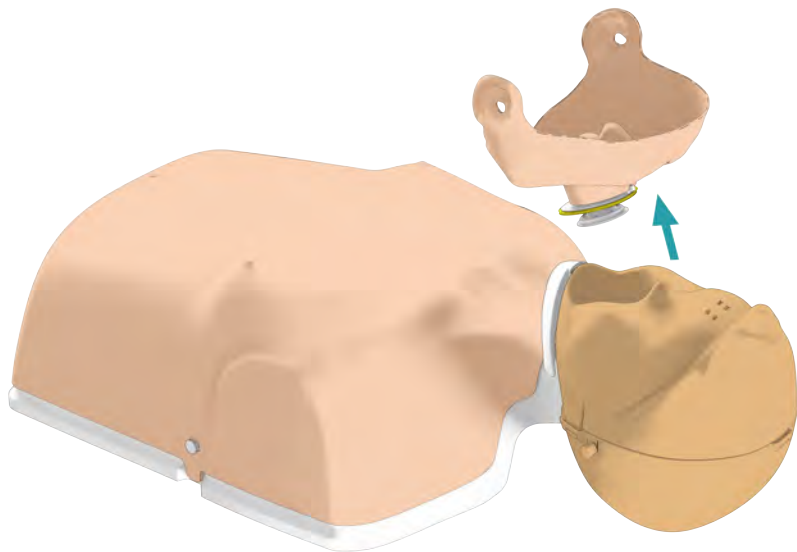


- フェイススキンを裏返し、マネキンフィルタを取り外します

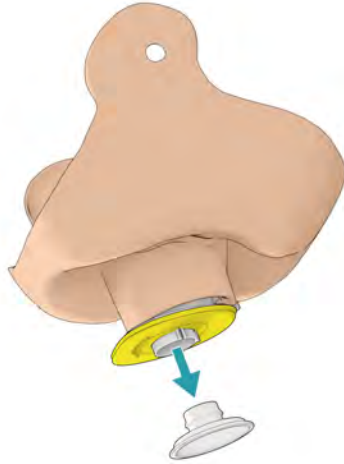**注意**


- マネキンフィルタは講習会ごとに交換してください
- 各地域の指示に従って廃棄、リサイクルしてください

- フェイススキンをバッグに戻します

4. 顔の両側を押して取り外します

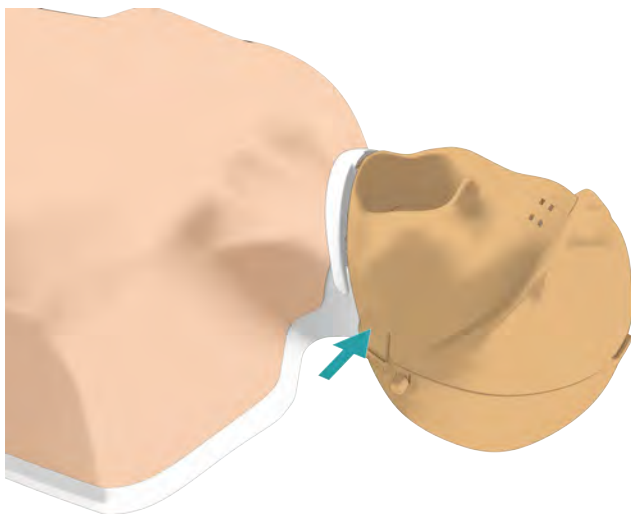

5. 顔を外します

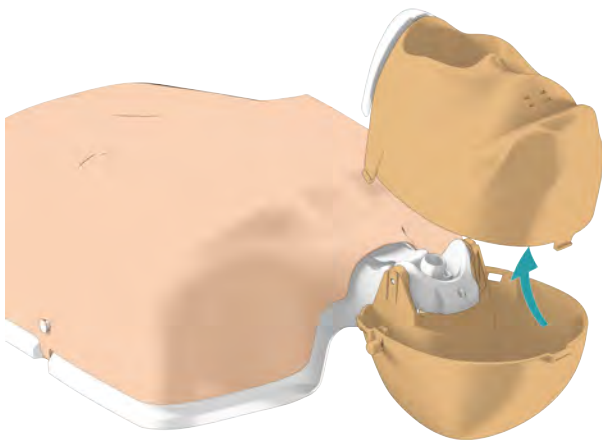

6. スーツケース内のポーチに、2個ずつ重ねて戻します



注意

スーツケース内で2個より多くの顔を重ねると破損する恐れがあります



- フェイススキンとマネキンフィルタをスーツケースに入れます

8. マネキンの頭を上にして積み重ね、スーツケース内のポーチの上に置きます。



注意

- スーツケース内に6体より多くのマネキンを積み重ねると破損する恐れがあります。
- 全ての顔がポーチに収まっていることを確認してください。スーツケース内のマネキンの上に顔を置かないでください。

メンテナンスとクリーニング

エアウェイ（肺）の交換

エアウェイは約5万回、3～6ヶ月間使えるように設計されています。この目安で交換するか、壊れたら交換してください。

フェイスのクリーニング

マネキンフェイスのクリーニングは[こちらのビデオ](#)をご参照ください。

胸スキンのクリーニング

胸スキンのクリーニングは[こちらのビデオ](#)をご参照ください。

Copyright© 2023 Laerdal Medical AS

www.laerdal.com

