



Laerdal

helping save lives



さらに使いやすくなったレールダル サクシオンユニット

Laerdal Suction Unit

1968年よりレールダル サクシオンユニットは緊急時の強力なサポーターとしてプロフェッショナルな方々を支えて参りました。

Serresタイプは感染予防に役立つ Disposable です。

お客様の必要に応じて従来の再使用型 (LSU4000) もお選び頂けます。



LSU4000



Serres

www.laerdal.com

Serresタイプ —新しくなったディスポーザブルLSU

進化したデザイン

ユーザーの視点に立って、デザインも一新しました。
各部接続を簡易にし、組立時のエラー発生リスクを低くしました。

Security of Supply

Serres社はヨーロッパでは有数の吸引器サプライヤーです。
Serresタイプはインホスピタル、プレホスピタル双方の医療従事者にとって
現場のニーズに即した製品となっています。
使い捨てのライナーは感染予防に大きな力を発揮します。



LSU features

LSUは工具が要らないバッテリー交換、吸引調整などの特徴を備えており、耐衝撃性、防まつ性を備えています。しかも静かです。

LSUは使用前のチェックをユーザー自身で行うことができます。

下記の項目がテスト可能です。

- 吸引器内部の詰まり
- 吸引機能の有効性
- 最大到達吸引レベル
- 空気漏れ
- バッテリー充電容量



キャニスター、チューブシステム
およびバッテリーを除く

Graphic User Interface



特別な道具を用いることなく、
バッテリーの交換が可能です。



大きなダイヤルは手袋をはめた
ままでも簡単に調整が可能です。



手袋をはめたままブラケットより
取外しができます。



組立時の接続を簡素化しました。

レールダル サクションユニット LSU

| カタログ番号 | 商品名 |
|----------|--|
| 78000005 | レールダル サクションユニット LSU4000 再使用型キャニスター付 |

消耗品・アクセサリ

| カタログ番号 | 商品名 |
|----------|--------------------------|
| 784007 | 吸引シール(10 個) |
| 770410 | 再使用型吸引チューブ |
| 784008 | ガスケット(10 個) |
| 65011305 | 吸引カテーターアダプター(10 個) |
| 781006 | アングルコネクタ(10 個) |
| 781002 | フロートボール(10 個) |
| 78120005 | 新型キャニスター用 エアロゾルフィルター(1枚) |
| 78400005 | 再使用型キャニスター |
| 780430 | キャニスターホルダー |

レールダル サクションユニット LSU Serres

| カタログ番号 | 商品名 |
|----------|---|
| 78003005 | レールダル サクションユニット LSU4000 Serres キャニスター付 |

消耗品・アクセサリ

| カタログ番号 | 商品名 |
|----------|---------------------------|
| 57151 | ★Serres サクションバック青 |
| 780451 | Serres ディスポーザブルキャニスターホルダー |
| 781206 | Serres 吸引コネクタ |
| 78041205 | ★ディスポーザブル吸引チューブ |
| 57300 | Serres キャニスター 1000ml |
| 57151-2 | ★Serres サクションバック青(36個入り) |

★は使い捨てです。再使用はできません。

2タイプ共通

■サイズ

寸法:幅(W)33.0×長さ(D)31.5×高さ(H)16.0cm
重量:4.0kg(バッテリー含む) キャニスター容量:1,000mL
吸引チューブ: 内径8mm/長さ150cm

■設定吸引圧と自由空気流量

| 10.6kPa (80mmHg) | 16.0kPa (120mmHg) | 26.6kPa (200mmHg) | 46.6kPa (350mmHg) | 66.5+kPa (500+mmHg) |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 12 L/min | 16 L/min | 20 L/min | 23 L/min | 25 L/min |

■バッテリー作動時間

| 10.7kPa (80mmHg) | 16.0kPa (120mmHg) | 26.7kPa (200mmHg) | 46.7kPa (350mmHg) | 66.7+kPa (500+mmHg) |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 3時間20分 | 2時間20分 | 1時間30分 | 1時間 | 45分 |

■所用電力

| 作動/充電 | 充電式密封型鉛蓄電池 |
|-------------------------|--------------|
| 100-240 VACまたは12-28 VDC | 12 VDC 2.0Ah |

販売名: レールダル サクション ユニット LSU 4000
製造販売承認番号: 21200BZY00521000

消耗品・アクセサリ

| カタログ番号 | 商品名 |
|--------|----------------------------|
| 780433 | ディスポーザブル吸引チューブ用ストラップ |
| 780432 | キャニスターホルダーリリースアーム |
| 780210 | AC電源コード |
| 780800 | LSUバッテリー |
| 780435 | ボトルホルダー |
| 793500 | ウォーターボトル |
| 782610 | AC電源コード付ウォールブラケット(LSU4000) |



製造販売元
レールダルメディカルジャパン株式会社
〒102-0075 東京都千代田区三番町6-26 住友不動産三番町ビル
お問い合わせ先 050-3733-2698
CustomerService.jp@laerdal.com



Laerdal[®]
helping save lives

※当カタログの記載内容は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
※お問い合わせはカスタマーサービスでお受けいたします。