

医療用品(05) 副木
一般医療機器 単回使用パッド入り副木 35357000

スティフネック セレクト

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 患者に装着したままサイズを調節しないこと。

【形状・構造及び原理等】

<各部の名称>

写真は成人用

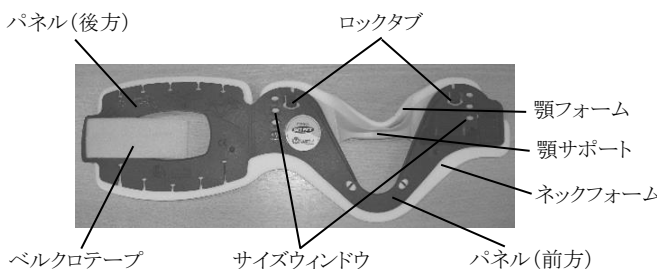

<寸法>

パネル

成人用: 564mm × 175mm (許容差±5%)

小児用: 480mm × 140mm (許容差±5%)

<体に接触する部分の原材料>

ネックフォーム: ポリエチレン

顎フォーム: ポリエチレン

【使用目的又は効果】

救急現場において頸椎損傷が疑われる患者の頸部を素早く固定し、搬送時の損傷拡大を防止します。

【使用方法等】

詳細については、取扱説明書をご参照下さい。

- 一人が患者の頭部を正中中間位(ニュートラルポジション)で保持し、もう一人が肩から顎までの長さを指の本数で計測します。なお、患者の頭部は装着している間も常に両手で保持し続けて下さい。
- 計測した長さに基づき、適切なサイズウインドウを選択します。選択した位置に顎サポートを調節し、左右のロックタブを押して固定します。
- 装着しやすいように、予めパネルを変形させます。
- 顎サポートを患者の下顎に当てます。
 - 座位・立位の場合
患者の前胸壁を滑らすようにして、顎サポートを下顎に乗せます。サイズが合わない場合は、取り外してサイズを合わせてから当て直して下さい。
 - 仰臥位の場合
パネル(後方)を首の後ろに滑り込ませてから、顎サポートを下顎に当てて下さい。
- パネル(後方)を後頭部に巻き付けて、ベルクローテープをしっかりと留めます。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 脊椎の損傷が疑われる場合は、頸部固定だけでなく脊椎全体の固定を行うこと。
- サイズの合わないものは使用しないこと。大きすぎると患者の頸椎が過度に伸展されることがあり、小さすぎるとしっかり固定できません。

【保管方法及び有効期間等】

* <使用条件>

使用温度: -18℃ ~ +43℃

<保管方法>

保管温度: -34℃ ~ +52℃

折りたたんで保管しないこと。平らにして保管して下さい。

<使用期間>

24時間を超過して使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: レールダル メディカル ジャパン株式会社

住所: 東京都千代田区三番町6番地26

住友不動産三番町ビル

電話番号: 03-3222-8080

お問い合わせ先: レールダル・ヘルプデスク

**電話番号: 050-3733-2698

取扱説明書を必ずご参照下さい。