

機械器具(06) 呼吸補助器
一般医療機器 人工呼吸器用マスク 70564000
レールダル ポケットマスク

【禁忌・禁止】

- 一方向弁及びフィルターの再使用禁止
- 使用後のマスクの洗浄には、低温殺菌、煮沸、ガス滅菌、オートクレーブは行わないこと。[変形及び品質劣化のおそれがあるため]

【形状・構造及び原理等】

＜各部の名称＞



＜寸法等＞

一方向弁取付部 外径:15mm

＜体に接触する部分の原材料＞

マスクカフ :軟質塩化ビニル樹脂
一方向弁 :ポリカーボネート

【使用目的又は効果】

患者の鼻、口をおおって行う人工呼吸に用います。一方向弁取付部に、手動式人工蘇生器(バッグバルブマスク)もしくは他の人工呼吸器の呼吸回路を接続し、患者にガスを供給することができます。付属の一方向弁とフィルターを取付けることにより、口対マスク人工呼吸にも用いることができます。

【使用方法等】

詳細については、取扱説明書をご参照下さい。

＜成人及び小児への使用＞

1. フィルターがマスクドーム内側の接続部に確実に取り付けられていることを確認し、ドームを外側に押し出します。
2. 一方向弁をマスクの一方向弁取付部に取り付けます。一方向弁の吹込口側をマスクの"nose"マークのある側の反対に向けます。人工呼吸器を使用する場合は、フィルターを外し、人工呼吸器を一方向弁取付部に取り付けます。
3. 初めに、患者の口が開放状態に保たれるように、マスクの縁を下唇と顎先の間に当てます。"nose"のマークのある側を患者の鼻の上に配置します。
4. マスクを患者の口と鼻を覆うように密着させ、気道を確保したまま胸が上昇するまでゆっくり息を吹き込みます。人工呼吸器を使用する場合は、人工呼吸器の取扱説明書に従って下さい。
5. 息の吹き込み後、マスクは固定したままで、救助者は口を離して、患者に呼吸を排出させます。人工呼吸器を使用する場合は、人工呼吸器の取扱説明書に従って下さい。

＜乳児への使用＞

1. 乳児に対しては、マスクの"nose"のマークのある側が顎の下になるように逆に向けて使用します。
2. マスク装着後は成人の操作手順と同様です。

＜フィルター＞

取り外し及び取り付け時には、マスクを折り畳んだ状態にして下さい。

• 取り外し

1. マスクを片手で保持し、もう一方の手でフィルターのハウジングをつかみ、引っ張って外します。
2. フィルターを廃棄します。

• 取り付け

新しいフィルターをマスクドーム内側の接続部に押し込み、確実に取り付けます。適切に取り付けるために、強く押し込んで下さい。フィルターが正しく取り付けられていないと脱落するおそれがありますので、強く押し込んで確実に取り付けして下さい。

＜一方向弁＞

• 取り外し

1. マスクを片手で保持し、もう一方の手で一方向弁をつかんで引き抜きます。
2. 一方向弁を廃棄します。

• 取り付け

新しい一方向弁をマスクの一方向弁取付部に取り付けます。一方向弁の吹込口側をマスクの"nose"マークのある側の反対に向けます。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 人工呼吸器に接続する場合は、事前に接続が正確で完全であることを確認すること。

＜その他の注意＞

1. 使用前に変形、亀裂、破損、異物の付着及び汚れのないことを目視確認すること。異常がある場合は使用しないこと。
2. 一方向弁を使用する場合は、その接続が正確でかつ完全であることを確認してから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜使用条件＞

使用温度: -10℃～40℃

＜保管方法＞

保管温度: -40℃～50℃

【保守・点検に係る事項】

＜マスクの洗浄方法＞

1. 温かい石鹸水でこすり洗いを行い、きれいな水で1分間以上すすぎます。
2. 0.5%次亜塩素酸ナトリウム溶液に10分間浸した後に、水道水で3分間すすぎ、その後完全に乾かします。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者: レールダル メディカル ジャパン株式会社
住 所: 東京都千代田区三番町6番地26
住友不動産三番町ビル
電 話 番 号: 03-3222-8080
お問い合わせ先: レールダル・ヘルプデスク
**電 話 番 号: 050-3733-2698

取扱説明書を必ずご参照下さい。