

CPRmeter 应用程序

快速设定指南



📄 注意：显示界面可能会因版本不同而异。

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



CPRmeter 应用程序能够就心肺复苏术表现生成事后评估报告并进行数据分析。该应用程序提供按压回弹程度、按压深度、按压频率、按压分数以及详细时间表等统计数据。



连接至 CPRmeter 2


按下 CPRmeter 2 上的电源按钮以打开 QCPR“快速查看”页面。蓝色灯光闪烁表示蓝牙已打开并等待连接。

注意

请在首次使用之前以及每次更换电池后将 CPRmeter 2 连接至 CPRmeter 应用程序。如果没有连接，心肺复苏术环节的时间戳可能会不正确。

时间戳不正确

某个环节可能没有附注日期与时间。如果在连接至应用程序之前或更换电池后存储数据，则可能会出现这种情况。点击橙色警告标志以获取更多信息。

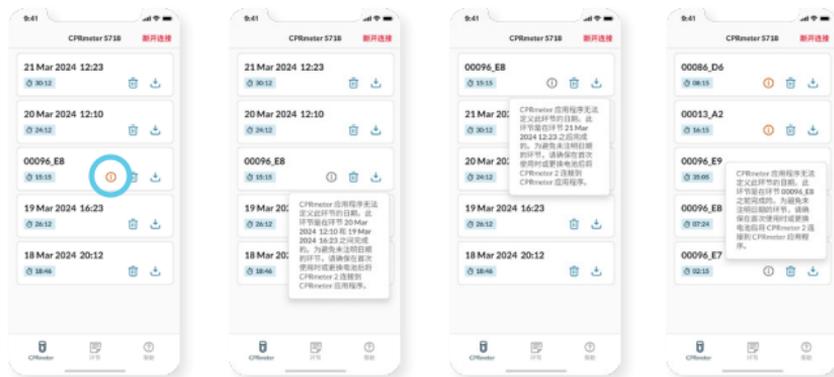

如果要充分利用您的产品或下载 CPRmeter 应用程序，请访问：laerdal.com/CPRmeter2。

