

CPRメータアプリ

クイック セットアップ ガイド



注: デザインはバージョンによって異なる可能性があります。

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



CPRメータアプリは、イベント後のデブリーフィングと CPR の質についてのデータ分析に使用できます。ここでは、詳細なタイムラインと併せて、胸骨圧迫の解除、深さ、速さ、割合に関するデータを確認することができます。



CPRメータ 2 への接続


CPRメータ 2 の電源ボタンを押して、[QCPR クイックレビュー] 画面を開きます。青色のライトが点滅したら、Bluetooth がオンになり接続できる状態であることを示します。



初めて使用する前とバッテリー交換時は必ず CPRメータ 2 を CPRメータアプリに接続してください。接続しないと、CPR セッションに誤ったタイムスタンプが記録される可能性があります。

誤ったタイムスタンプ

セッションに日時が記録されないことがあります。この問題は、アプリへの接続前またはバッテリーの交換後にセッションが記録された場合に生じる可能性があります。詳細は、オレンジ色の警告サインをタップしてご確認ください。

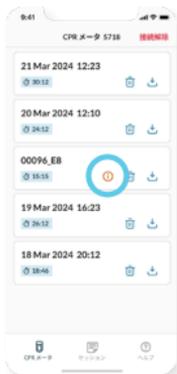

本製品を最大限に活用したり CPRメータアプリをダウンロードするには、laerdal.com/CPRmeter2 にアクセスしてください。

