

AED トレーナ 使用説明書



品番：197-01050 / 197-02050




Laerdal
helping save lives

各部の名称

パッド用ソケット

電源ボタン

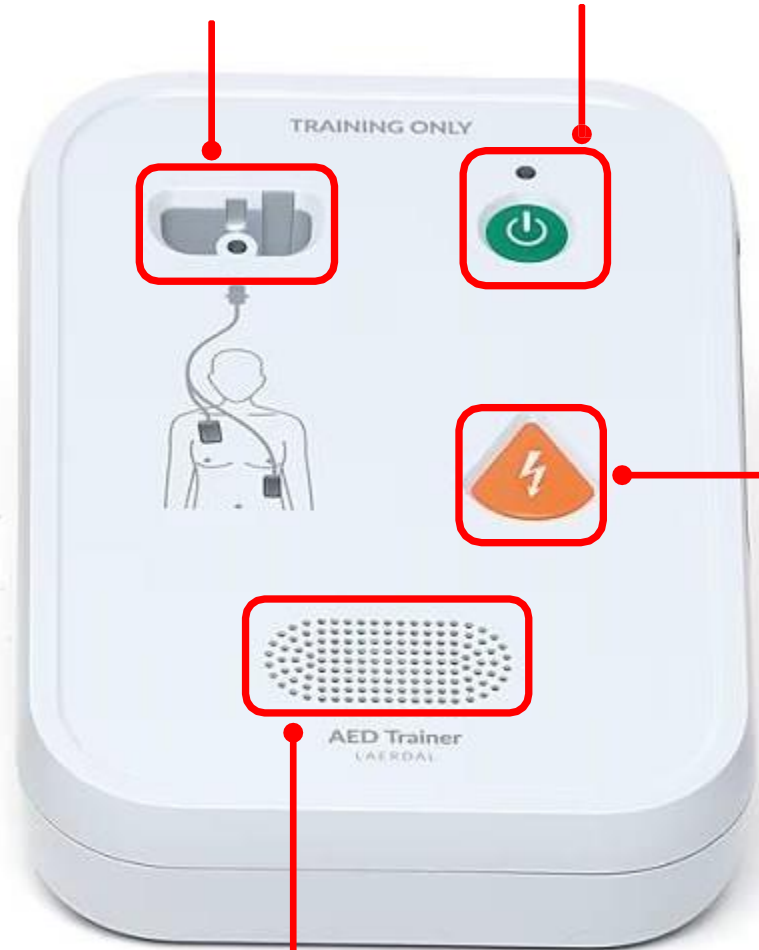


ショックボタン

スピーカー

【本体のサイドパネル】

音量ボタン

Bluetoothボタン

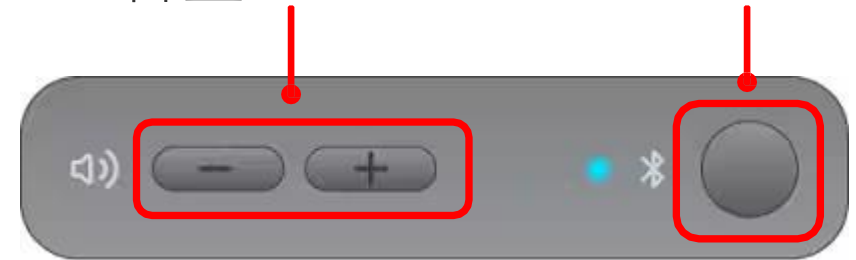

音量ボタンの「+」とBluetoothボタンを同時に2秒押すとシナリオ設定モードになります。

「+」と「-」でシナリオを選択し、Bluetoothボタンで確定します。

仕様 駆動時間



【使用電源】

単三電池 x 4本

【駆動時間】

約200時間※使用するシナリオによって異なります。
節電機能として10分使用しない場合は電源がオフになります。

低バッテリー警告：

バッテリー残量が少なくなるとBluetooth LEDランプが青と赤で点滅します。



QCPRアプリでは、バッテリー残量が少なくなると抜
バッテリー残量低下アイコンが表示されます。

仕様 リモコン使用

リモコンはQCPRアプリに登録



Download **QCPR App**



laerdal.com/aedtrainer



QCPRアプリアカウント登録

インストラクターモード

- AEDトレーナを操作する場合は、インストラクターモードを使用します。初めてアプリを使用する場合は事前にメールアドレス、名前、パスワードの登録が必要になります。

初めて登録する場合
既にアカウントをお持ちの場合

QCPRへようこそ。

高品質のフィードバックを提供するアプリです！

あなたはインストラクターですか？



無料で登録して、より多くの機能をご利用ください。

はじめに

アカウントがあります

あなたは学習者ですか？



続行して、個別のフィードバックを得る

学習者です

インストラクターモード アカウント登録

<  Laerdal
helping save lives

登録して続行

すべての設定が保存されている Laerdal アカウントを作成します。

メールアドレス

次へ

過去にアカウントなしで QCPR を使用したことがある場合は、アカウントを作成する必要があります。

メールアドレスを入力して「次へ」を押す



プロフィールを作成

XXXXXXXX@laerdal.com

Laerdal のすべての製品とサービスにアクセスするには、情報を登録してください。

名

姓

次へ

名前を入力して「次へ」を押す

新しいパスワードを設定


XXXXXXXX@laerdal.com

パスワード

✓ 良い - 文字数を増やして

「アカウントの作成」を選択すると、ここで送信された個人情報がアカウント管理のために使用されます。詳細については、[プライバシーに関する](#)

アカウントを作成

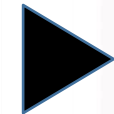

パスワードを入力して「アカウントを作成」を押す

インストラクターモード アカウント登録



受信箱を確認

6桁の確認コードをに送信しました

XXXXXXXX@laerdal.com

コード

コードを再送信

メールアドレスへ送られてきたコードを入力して「続行」を押す

三 トレーニング

トレーニングモード

新規

CPR

AED Trainer

幼児の窒息

CPR ゲーム


新規

登録が完了し、メイン画面が表示されます

AEDトレーナーの設定



※設定方法動画

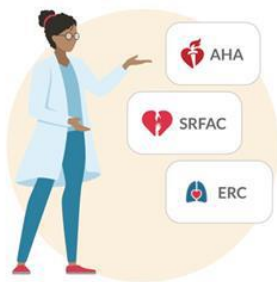

新機能


ガイドラインサポート
地域のCPRの推奨事項に従ってトレーニングします。

デバイスの管理
マネキンを最新のファームウェアで最新の状態に保ちます。

詳細な結果
改善された各学習者の詳細な結果をアプリで取得しましょう。

続行

タップ

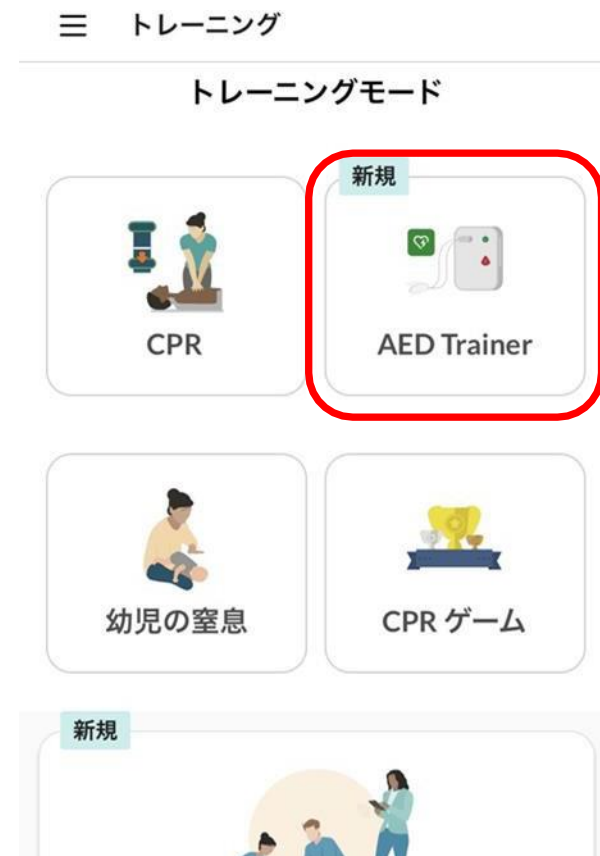

AED Trainerモードを選択

×

AEDトレーナーを選択する

設定するAEDトレーナーを選択します。

AED 00
AED Trainer



一度に選択できるのは1つのみです。

続行

タップ

接続するAEDトレーナーを選択し「続行」を選択

AEDトレーナの設定



※設定方法動画

AEDトレーナに番号を付ける

固有の番号を使用すると、リモコンを使用するときに識別しやすくなります。

続行

タップ

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
.	0	✕

AEDトレーナに番号を付番し「続行」

言語を選択

AED Trainerではどの言語を使用しますか？

Português (Brasil)

Português (Portugal)

Suomi

Svenska

中文 (China)

한국어 (Korea)

日本語 (Japan) ✓


続行

日本語を選択し「続行」

準備が完了しました！

AEDトレーナの使用を開始できます。

トップバーの♥アイコンを押すと、トレーニング中にリモコンにアクセスできます。

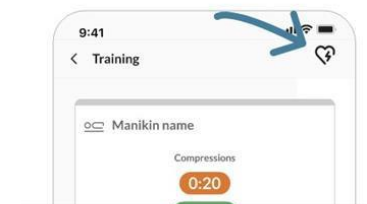

AEDのリモコンに移動

タップ

もう1つ設定する

「AEDのリモコンに移動」をタップ
複数所有の場合は「もう一つ設定する」へ

リモコン操作


＜ トレーニング

すべて 1 選択済み



現在の設定

設定変更画面

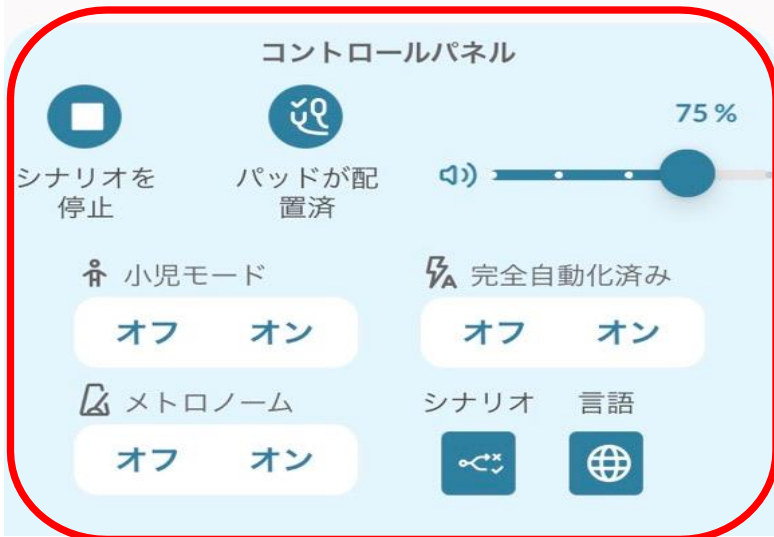

アイコン	説明
	シナリオ (およびオーディオ) 停止 すべての AED トレーナを選択し、停止ボタンを押すと、実行中のすべてのシナリオが停止します
	パッドが配置確認 研修者は実行中のシナリオよりも早く進む可能性があります。パッドの確認ボタンを使用して、シナリオを次のステップに進めます
	スピーカー音量調整 AED トレーナを個別に、またはすべての音量を一度に調整します
	未就学児モード切替 AED トレーナを未就学児用のプロトコルを実行させたい場合に、未就学児モードを使用します
	オートショック機能切替 オートショック AED トレーナモードに切り替えます
	メトロノーム機能 研修者に一定のリズムで練習する時間を提供します
	シナリオ切替 個別に、またはすべてのシナリオを切替ます。6つの異なるシナリオが利用可能です。解析中断時間の CPR 時間を 2 分から 3 分に切り替えることもできます。
	言語切替 リモコンで言語切り替えます。学習者の地域言語に従って CPR をトレーニングを実施出来ます、異なる言語 (17 種類の言語が利用可能) でトレーニングも可能です

リモコン操作

すべて 1 選択済み

AED 01
 4 JA

現在の設定

設定変更画面

シナリオを停止 コントロールパネル パッドが配置済

小児モード 完全自動化済み



オフ オン オフ オン

メトロノーム シナリオ 言語

オフ オン

シナリオ	記号	概要
1		2回のショックが必要
2		ショック不要→ショック必要→ショック不要
3		1回のショックが必要
4		一貫してショックが必要
5		一貫してショックが不要
6		パッドのトラブル後、ショック必要→ショック不要

リモコン操作 – 言語設定

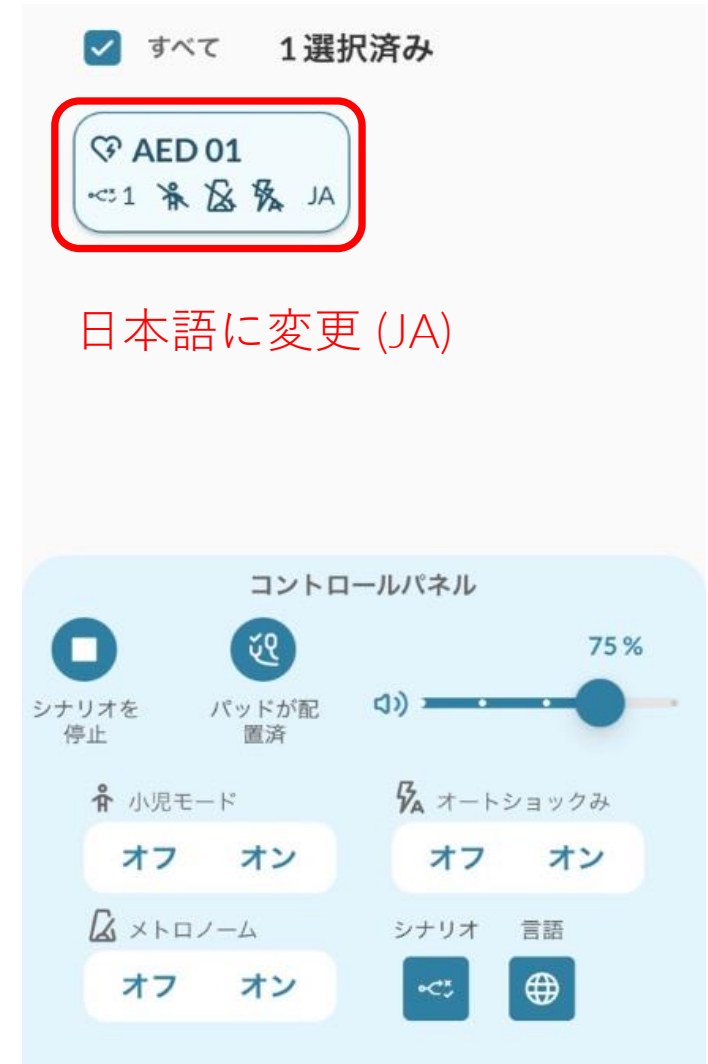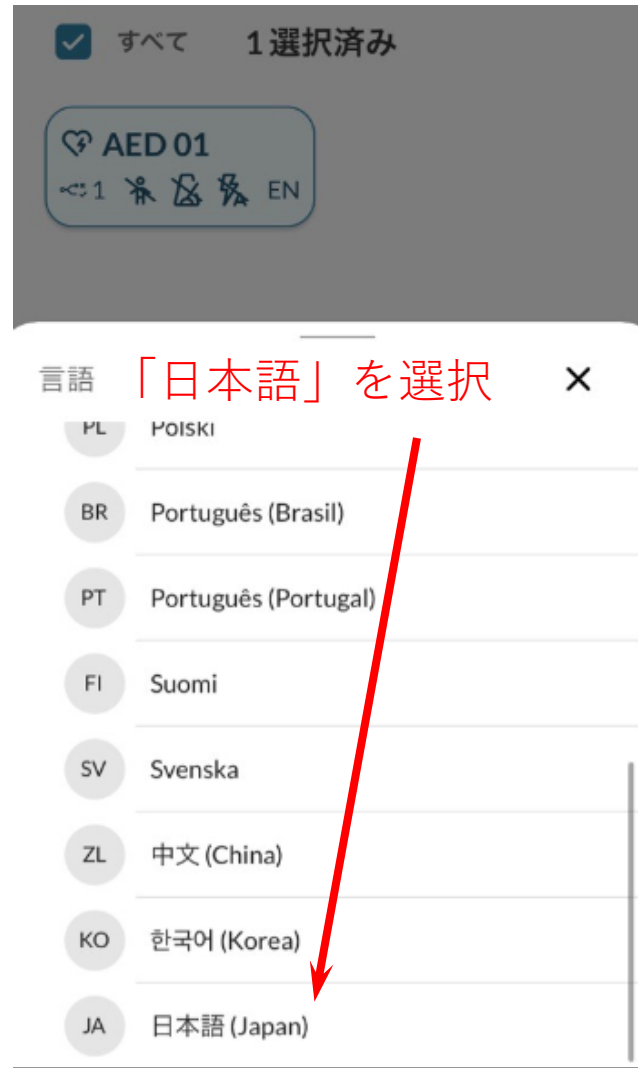


トレーニングパッド

使用可能なトレーニングパッド



AED リンク トレーニングパッド
※白コネクタ
品番：198-80750

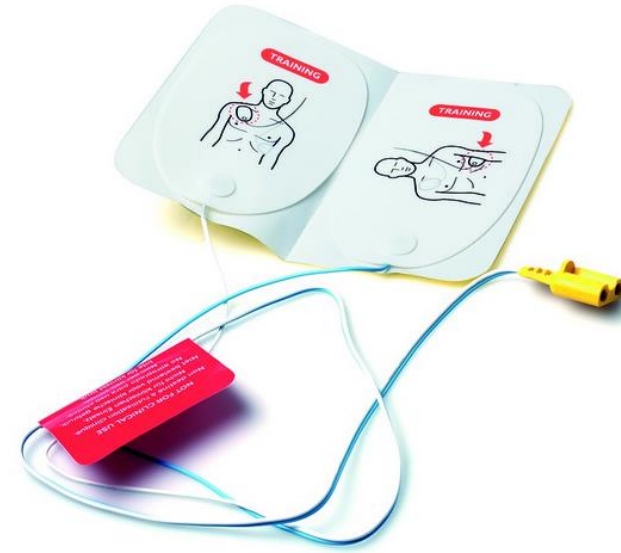

標準トレーニングパッド
※黄色コネクタ
品番：198-80650

AEDリンクトレーニングパッド



品番：198-80750

レールダルリンクテクノロジーを使用する際に使用します。
※正しい位置にパッドを装着することでシナリオが進みます。



利用可能なマネキン

- AEDリトルアン
- AEDレサシアンQCPR

上記以外のマネキンはマネキン外部アダプタを使用します。




マネキン外部アダプタ
品番：M5089A

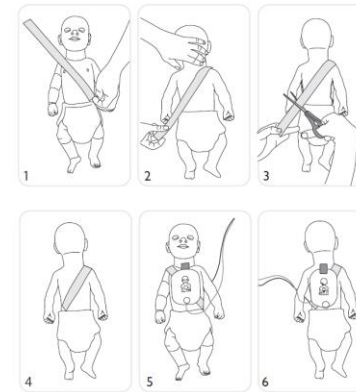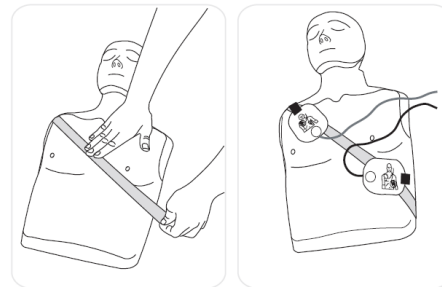

1. マネキン外部アダプタを左図のようにマネキンに装着します
2. パッドを張る際は図のようにマネキン外部アダプタの上に装着します

標準トレーニングパッド

パッドコネクタを本体に差し込めばシナリオが進みます。

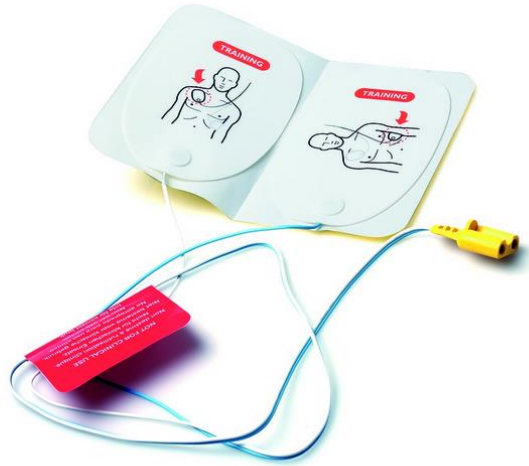

利用可能なマネキン
全てのマネキンで使用可能

品番：198-80650



Laerdal
helping save lives