

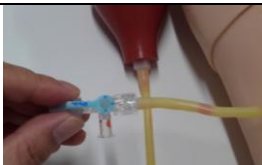
レールダル社 動脈アームキット 取扱手順書

1. 準備物品

動脈アームキット本体		疑似血液用インク		シリンジ (20ml以上)	
--	---	--	---	---	---

三方活栓 (又は三方活栓付延長チューブ)		穿刺用針		水30ml程度
--	---	--	--	---

2. 使用手順

1. 動脈アームキットの疑似血管(ゴム管)に三方活栓(又は三方活栓付延長チューブ)を接続する。	
2. 水に疑似血液用インクを数滴垂らし、疑似血液を作る。	
3. 疑似血液をシリンジ(20ml以上)に充填する。	
4. 三方活栓のメインルートに保護栓を付け、側注口に疑似血液を充填したシリンジを接続し、疑似血管へ疑似血液を15～20ml程度充填する。 (※三方活栓のバーの向きに注意して下さい)	
5. 疑似血管への充填が終わったら、三方活栓のバーを写真の向きに変更する。	

※ここからは2人での操作となります。(1人：補助 一人：穿刺)

6. 三方活栓のバーの向きが間違っていない事を確認し、一人がゴム球を揉む。 (なるべく拍動をイメージして揉んで下さい)	
7. 触診で橈骨動脈を探す。	
8. 穿刺 (バックフラッシュで確認)	

3. 片付時注意

- | |
|---|
| <p>1. 疑似血液はインクですので、時間が経つと沈殿し着色します。疑似血管から疑似血液を抜いて保管する事をお勧め致します。</p> <p>(疑似血液を抜く際は、空のシリンジで三方活栓から引いて下さい。必要であれば水でフラッシュして下さい。)</p> <p>2. インクが衣服や皮膚に着くと非常に落ちにくいので取り扱いに御注意下さい。</p> |
|---|