

Pediatric Intubation Trainer 小児気道管理トレーナ

Japanese

取扱説明書



LaerdalTM
helping save lives

目次

構成品	2
トレーニング内容	2
取扱説明	3
ケアとメンテナンス	3
保証	3
消耗品	4

小児気道管理トレーナは、6歳の患者の頭部と上半身を再現し患者の状態をリアルにシミュレートします。本製品は、小児気道管理技術のトレーニングを行う医療従事者向けに、特別に設計されています。

品質を重視し、個々の部品の交換の容易さにより、適切な取扱とメンテナンスを行うことで、長年にわたってトレーニングが可能です。

構成品：

小児気道管理トレーナ 本体 1
潤滑剤 1
ケース 1

トレーニング内容：

- 経口挿管
- 経鼻挿管
- バッグバルブマスク換気
- 経口エアウェイ挿入
- 経鼻エアウェイ挿入

取扱説明:

本製品で挿管を行う場合、次の器具のご使用を推奨します。

- a. 気管チューブサイズ 4 又は 5 (カフあり・なし)
- b. 潤滑剤または液体石鹼
- c. 喉頭鏡ブレード サイズ 2 ストレート型、又はカーブ型
- d. 喉頭鏡ハンドル

推奨事項

エアウェイを挿入する前、すべてのチューブ類、気道内に潤滑剤か刺激の少ない液体石鹼を使用して下さい。

ケアとメンテナンス:

1. 刺激の少ない石鹼と水で洗って下さい。洗浄液や水の中に本製品を浸さないで下さい。
2. マネキンは清潔な場所で使用して下さい。フェルトペンやインクペン、アセトン、ヨード剤その他のシミの原因になる物質が付着しないように気を付け、さらに新聞紙などあらゆるタイプの印刷物の上にマネキンを置くことがないようにして下さい。
3. 長く使用していただくため、マネキンは1回のトレーニングセッションが終わるたびにクリーニングし、また、定期的に全体の点検を行って下さい。
4. 次回トレーニングまで製品を適切に保管して下さい。

保証:

同梱されている小冊子 Global warranty もしくは弊社ホームページ <http://www.laerdal.com> をご参照下さい。

**注意と警告**

本製品は天然ゴムラテックスを含有しているため、接触時にアレルギー反応が起きる場合があります。

消耗品:

カタログ番号:

250-21050

製品名:

潤滑剤



注意と警告

本製品は**天然ゴム**ラテックスを含んでおり、
皮膚接触によってアレルギー反応を起こす原因と
なる可能性があります。

部品交換

最新の消耗品と部品はホームページをご覧ください。 www.laerdal.com

グローバル保証

レールダル グローバル保証ブックレット、あるいはホームページを
ご覧ください。 www.laerdal.com

(C) Copyright Laerdal Medical Japan K.K.
Document #1001635 rev E
Japanese version May 2025

製造販売業者： レールダル メディカル ジャパン株式会社
電 話 番 号： 050-3733-2698